

MARCHE D'ACCÈS AU BAIN MOOREA REF. 812225




La marche empilable est d'une hauteur de 12 cm et est équipée de plots antiglisse. Chaque marche est assemblable l'une à côté de l'autre et empilable l'une sur l'autre de façon à former un véritable et solide escalier permettant l'accès en hauteur.

Utilisation de 2 marches empilées l'une sur l'autre :


Otez les 4 bouchons de la marche inférieure de façon à ce que les 2 marches s'emboîtent parfaitement.

Conservez les bouchons pour une éventuelle prochaine utilisation.

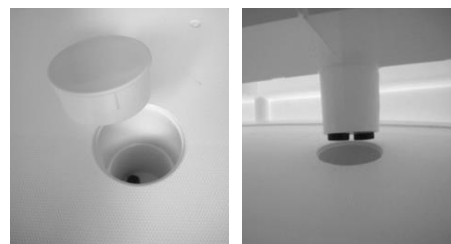

Utilisation des marches cote-à-cote :

Assemblez les marches de façon à ce que les encoches de l'une s'emboîtent sous l'autre marche. Vous obtenez ainsi un ensemble solidaire et fiable.

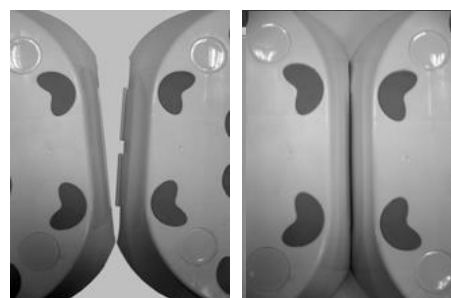

Qu'elles soient placées cote-à-cote, empilées l'une sur l'autre ou bien assemblées de façon à former un escalier (3 marches au minimum) Les marches empilables sont sûres, stables et supportent jusqu'à 190 kg.



ATTENTION Restez très prudent lors de la sortie de la baignoire ou de la douche.

Made in China



Identités – ZA Pole 49 Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU
FRANCE