

MODE D'EMPLOI

Article N° : 24 700 25/40 ; 24 701 25/40 ; 24 710 25/40 ; 24 720 25/40

SPECULUMS AURICULAIRES A USAGE UNIQUE

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Prendre un spéculum et le fixer sur un otoscope, pour les modèles 24 701 XX le clipper sur l'otoscope, pour les modèles 24 7X0 XX fixation à baïonnette. Après utilisation le jeter dans un récipient prévu pour les déchets médicaux.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Dispositif à usage unique non stérile.

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée. A utiliser en usage unique par personne, il est recommandé d'utiliser un spéculum par oreille par patient pour éviter les contaminations oreille/oreille sur la même personne. Ne jamais introduire le spéculum jusqu'au fond de l'oreille, respecter une distance adéquate avec le fond de l'oreille, risque de perforation. Bien maintenir la tête du patient pour éviter tout geste inadéquat. Dispositif à usage unique, ne doit pas être réemployé, risque de contamination croisée avec un autre patient.

**REFERENCES
COMED**

N° =
Réf. compatible

X =
Compatible

		MODELE HEINE						MODELE KAWE						MODELE RIESTER		MODELE WELCH ALLYN		
		ALPHA+	K 180	BETA 200	MINI 2000 + FO	MINI 3000 + FO+ FO LED	BETA 100	K 100	PICOLIGHT	COMBILIGHT C10	COMBILIGHT FO30	EUROLIGHT FO30	EUROLIGHT C10	EUROLIGHT C30	RI-STAR	RI-MINI + L1/L2 + L3 à bayonnette uniquement	POCKET PRO	POCKETSCOPE
24 700 25		X	B 000 11 128	B 000 11 128	B 000 11 128	B 000 11 128			01.712 11 002		01.712 11 002	01.7121 1 002				X		
24 700 25A		X	B 000 11 151	B 000 11 151	B 000 11 151	B 000 11 151			X		X	X				X		
24 700 25B		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
24 700 25AB		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
24 700 25C		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
24700ACV		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
2470025ACB		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
2470025ACN		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
24 700 40		X	B 000 11 127	B 000 11 127	B 000 11 127	B 000 11 127			01.712 21 002		01.712 21 002	01.7122 1 002				X		
24 700 40A		X	B 000 11 150	B 000 11 150	B 000 11 150	B 000 11 150			X		X	X				X		
24 700 40B		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
2470040AB		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
24 700 40C		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
2470040ACV		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
2470040ACR		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
2470040ACB		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
2470040ACN		X	X	X	X	X			X		X	X				X		
Modèle H	Ø 2.5 mm 24 701 25B						B001 1242	B001 1242		01.711 11 002			01.7111 1 002	01.711 11 002				
	Ø 4 mm 24 701 40B						B001 1241	B001 1241		01.711 21 002			01.7112 1 002	01.711 21 002				
Modèle R	Ø 2.5 mm 24 710 25B														X			
	Ø 4 mm 24 710 40B														X			
Modèle W	Ø 2.5 mm 24 720 25B																X	X
	Ø 4 mm 24 720 40B																X	X

N.B. Nos spéculums Modèle W, référence 24 720 25B et 24 720 40B, ne sont pas compatibles avec les otoscopes MacroView.
N.B. Our specula model W, reference 24 720 25B and 24 720 40,B are not compatible with MacroView otoscopes.