

## MODE D'EMPLOI

Article N° : 17 310 00

### Tampon alcomed

Déchirer le sachet individuel en suivant le pointillé. Retirer la lingette. Frotter légèrement sur la peau pour la désinfecter. Ne pas déplier le tampon, afin d'assurer une humidification plus importante et plus longue

#### PRECAUTION D'EMPLOI :

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas apposer sur un plaie ouverte ou suintante, ni sur un orifice naturel du corps.

Ne pas s'approcher des yeux, risque d'irritation.

Après ouverture à utiliser rapidement.

**Attention**, vapeur inflammables.

Tenir éloigné des étincelles, des flammes et d'une source de chaleur durant l'utilisation et pour le stockage