



**TABLE DE MASSAGE PLIANTE KINLIGHT**  
*Notice d'utilisation*



**REF. 827009**

## IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

## CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

## RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

## DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.

## GARANTIE


Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce cassée en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



1. Entretenez la table régulièrement. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le câble n'est ni usé ni effiloché. Vérifiez également qu'il n'y a aucune fissure sur la structure en aluminium.
2. Ne dépassez pas la charge maximale recommandée. Tout dépassement peut entraîner des blessures graves. Ce produit a été testé pour supporter une charge de travail maximale de 200 kg.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcool pour le revêtement en vinyle, car ils peuvent l'endommager. Utilisez plutôt de l'eau tiède savonneuse, puis essuyez soigneusement.
4. Lors de l'utilisation, assurez-vous que les quatre pieds de la table sont réglés à la même hauteur. Des niveaux différents peuvent rendre la table instable et provoquer des blessures.
5. Ne laissez pas les enfants monter ou démonter la table sans supervision.
6. Manipulez les objets tranchants avec précaution : ils peuvent percer le revêtement. Évitez tout contact entre la table et des objets coupants.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

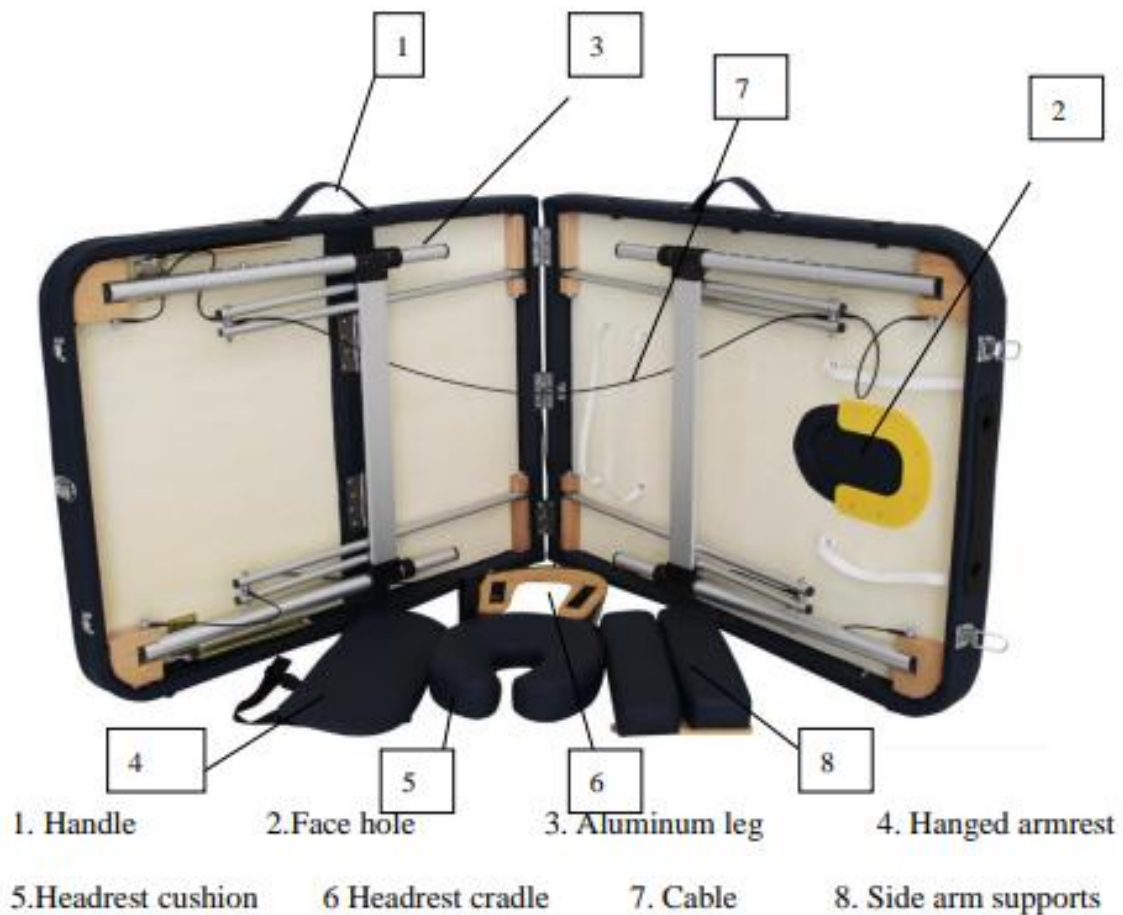

### Éléments de la table :

1. Poignée
2. Trou facial
3. Pieds en aluminium
4. Repose-bras suspendu
5. Coussin d'appui-tête
6. Support d'appui-tête
7. Câble de tension
8. Supports latéraux pour les bras

## MONTAGE



1



2



3



4



5



6

### Procédez comme suit :

1. Ouvrez la boucle de verrouillage.
2. Placez la table sur le côté, les quatre patins en caoutchouc au sol, puis déployez-la entièrement en sortant les quatre pieds.
3. Retirez tous les accessoires, puis redressez la table jusqu'à ce que les quatre pieds reposent au sol.
4. Insérez le support d'appui-tête dans les logements prévus et placez le coussin d'appui-tête dessus.
5. Fixez le repose-bras suspendu au support d'appui-tête, puis insérez les supports latéraux pour les bras dans les orifices situés de chaque côté de la table.
6. Votre table est maintenant prête à l'emploi.

### REMARQUE :

La hauteur de la table est réglable en appuyant sur les boutons en cuivre situés sur les pieds. Réglez les quatre pieds de la même manière, un par un, afin de garantir une stabilité parfaite.

## FERMETURE ET TRANSPORT



1. Retirez tous les accessoires.
2. Placez la table sur le côté, les patins en caoutchouc au sol.
3. Rangez les accessoires sous la sangle élastique fixée sous le plateau supérieur.
4. Repliez la table et verrouillez la boucle.
5. Glissez la table dans son sac de transport et portez-la comme une valise à l'aide de la poignée.



## Avertissement

Si le cadre, les pieds ou la structure de la table présentent des dommages, n'utilisez pas la table.  
L'utilisation d'une table endommagée peut provoquer des blessures graves à vous-même ou à votre client.  
Faites réparer la table avant toute nouvelle utilisation.



***Poids maximum autorisé 200 kg***

Distribué par :

*Identités*

*ZA Pole 49 Bd de la Chanterie*

*49124 Saint Barthélemy d'ANJOU*

*FRANCE*

*serviceclient@identites.tm.fr*