

FAUTEUIL DE RELAXATION

MERCATO



MANUEL D'UTILISATION

IDENTITES

Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48

www.identites.eu

INTRODUCTION :

Ce fauteuil est conçu pour apporter un confort maximum. Il est équipé d'un repose jambes très simple à manœuvrer.

Veuillez lire cette notice avec soin afin de tirer le meilleur parti de ce fauteuil.

Ce manuel doit être tenu à disposition pour un usage ultérieur après la première lecture.

SOMMAIRE

1 SECURITE	p. 2
2 CARACTERISTIQUES.....	p. 3
3 ASSEMBLAGE.....	p. 3
4 ENTRETIEN STOCKAGE	p. 4

1. SECURITE :

Attention

- Le fauteuil doit être assemblé correctement selon les instructions décrites ici. Le fabricant, ses agents et distributeurs ne sont pas responsables des dommages causés par un mauvais assemblage du fauteuil.
- Le fauteuil doit être placé sur un sol plat.
- Ne pas utiliser le fauteuil dans un environnement humide ou poussiéreux. Il doit être utilisé dans une pièce sèche.
- Ne pas placer le fauteuil près des radiateurs, poêles ou autre source de chaleur. Éviter l'exposition en continu au rayonnement du soleil.
- Ne pas utiliser le fauteuil à l'extérieur.
- Ne pas se reposer ou placez un objet lourd sur l'accoudoir, repose-pieds, ou le dossier du fauteuil.
- Ne pas sauter ou jouer sur le fauteuil.
- Ne pas mettre les doigts ou mains entre le siège et le repose jambes, quand le fauteuil est incliné ou lorsque celui-ci est en cours de manœuvre.
- Ce fauteuil doit être utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ce fauteuil n'est pas à usage professionnel.
- Le fabricant, ses agents et distributeurs ne sont pas responsables des dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation et d'abus de ce fauteuil.

IDENTITES

Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48

www.identites.eu

Attention

Utiliser le fauteuil dans une pièce à température modérée, ne pas augmenter la température brusquement. Il est recommandé d'augmenter la température de manière graduelle jusqu'à un niveau normal.

Vérifier l'état du revêtement régulièrement.


2. CARACTERISTIQUES :

Poids :	Poids du fauteuil = 43 kg La charge maximale = 150 kg
Dimensions de l'assise :	Profondeur = 52 cm, largeur = 51 cm, hauteur = 48 cm
Dimension hors tout :	Longueur = 105/154 cm, largeur = 65 cm, hauteur = 90/88 cm
Matière de l'habillage :	P.U – PVC - Polyester selon la version.
Composition du remplissage :	Mousse en P.U et fibre polyester
Châssis :	Bois

3. ASSEMBLAGE :


Le fauteuil est emballé dans 1 carton. Le dossier et le siège doivent être assemblés selon les instructions données ci-après.

Remarque : Ne pas assembler le fauteuil si le rembourrage ou des parties du fauteuil sont endommagés. Vérifiez soigneusement toutes les pièces avant d'assembler le fauteuil. En cas de problème, contacter le vendeur.

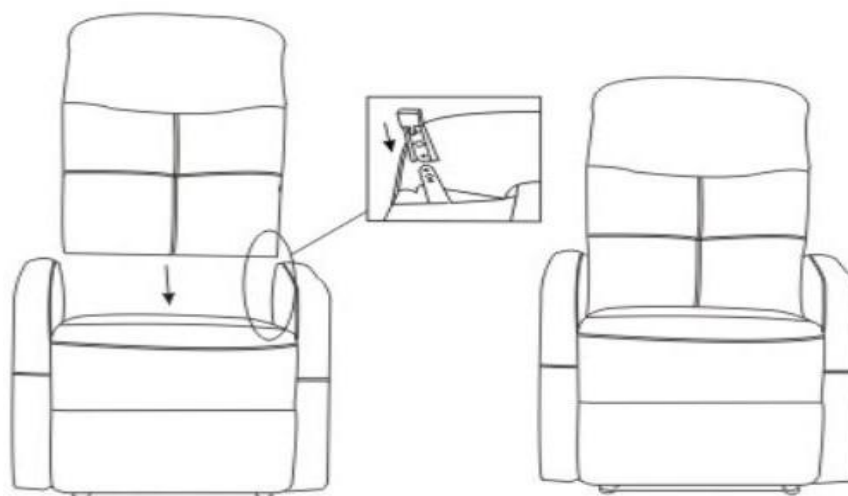**IDENTITES**

Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48

www.identites.eu

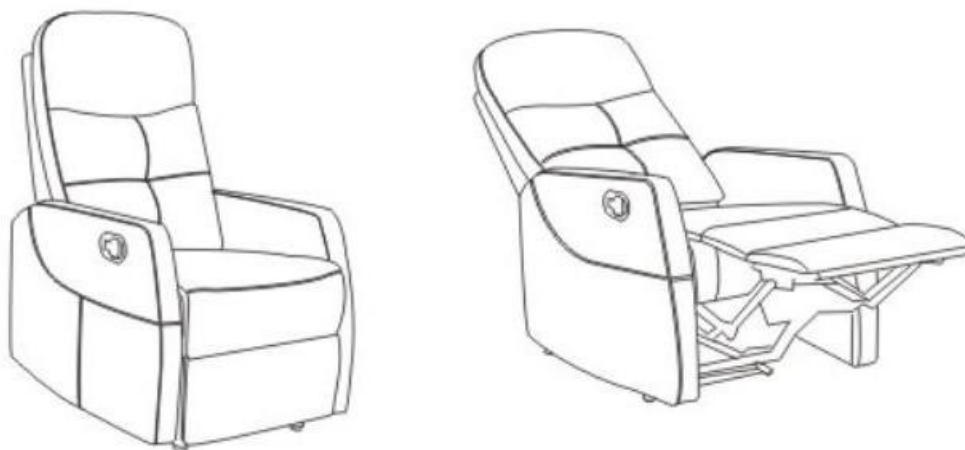

Attention:

- S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle devant et derrière le fauteuil avant opération.
- Ne pas insérer de doigts ou d'objets entre le fauteuil et le repose-pied.

4. CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Nettoyer avec une éponge humide si le revêtement est en PU ou PVC, et avec un détachant pour tissu si le revêtement est en tissu.
- Garder le fauteuil propre et dépoussiéré, éloigné de l'humidité.
- Si le fauteuil n'est pas utilisé pendant une longue durée, le couvrir d'un tissu propre pour le protéger de la poussière. Conserver le dans un local sec.
- Ne pas stocker le fauteuil en plein soleil ou dans des lieux à hautes températures. Cela peut entraîner la décoloration du tissu.

IDENTITES

Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48

www.identites.eu