



UAM-8400 (1 channel)



UAM-8500 (2 channels)

LYMPHA PRO

Equipement Pressothérapie professionnel



MANUEL D'UTILISATION









UAM-8400 (1CH)








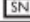
UAM-8500 (2CH)

Merci de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Cet appareil est à USAGE MÉDICAL

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Les indications | 1 |
| Précautions de sécurité | 2, 3 |
| Noms de chaque partie | 4 |
| Écran tactile | 5 |
| Préparations avant utilisation | 6, 7 |
| Procédure d'opération | 8 |
| Programmes MODE | 9 |
| Programme REVERSE, et SKIP | 10 |
| Fin du programme, la maintenance | 11 |
| A/S | 12 |
| Carte de garantie | 13 |
| Note | 14, 15, 16, 17 |

1. Indications

| INDICATIONS | |
|--|--|
| Description : Pressothérapie pro | Made in Korea |
| Modèle : UAM-8400 | |
| Maximum and Minimum niveau de pression 0-200mmHg | Nombre d'unité 1 pièce |
| Type: Class IIa   Voir manuel | Voltage: 230V, 50Hz |
| Fabricant : Maxstar Industrial Co., Ltd. ZIP: 10048 152-12, Hwanggeum-ro 23 beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea | Consommation 30W |
| EU Representative : ECONOVA 27 Bieszczadzka Street, 71-042, Szczecin, Poland. Tel: 48608346346 | Type   |
| Stockage/ Maintenance :   Voir manuel |  0476 Usage médical |
|  | |





| INDICATIONS | |
|--|--|
| Description : Pressothérapie pro | Made in Korea |
| Modèle : UAM-8500 | |
| Maximum and Minimum niveau de pression 0-200mmHg | Nombre d'unité 1 pièce |
| Type: Class IIa   | Voltage: 230V, 50Hz |
| Fabricant : Maxstar Industrial Co., Ltd. ZIP: 10048 152-12, Hwanggeum-ro 23 beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea | Consommation 60W |
| EU Representative : ECONOVA 27 Bieszczadzka Street, 71-042, Szczecin, Poland. Tel: 48608346346 | Type   |
| Stockage/ Maintenance :   Voir manuel |  0476 Usage médical |
|  | |





INDICATIONS

Ce produit est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé et des patients à domicile et les hôpitaux, sous surveillance médicale, dans le traitement de nombreuses affections, telles que: l'œdème primaire, œdème consécutif à un traumatisme, blessures sportives, œdème post-immobilisation, insuffisances veineuses et lymphoœdème.




2. PRECAUTIONS DE SECURITE

Les instructions figurant dans ce manuel d'instructions sont adaptées pour éviter toute blessure ou tout dommage si l'appareil est correctement utilisé. Merci de lire attentivement et le conserver pour pouvoir le consulter en cas de besoin.



- 1  ATTENTION
- 2  ATTENTION
- 3  ATTENTION
- 4  ATTENTION

|  ATTENTION consulter votre medecin si vous êtes sous traitement médicamenteux |  Précaution  Observation |
|---|---|
| 1)Consultez votre médecin si vous êtes sous traitement médical. 2)Ne le démontez pas. (risque de choc électrique.) 3)Ne pas l'utiliser trop longtemps ou à une puissance trop forte au risque de blessure ou d'inconfort.(max 60min par jour) 4)Consultez votre médecin en cas de sensation de mal aise 5)En cas de panne de courant, éteignez et rebranchez. 6)Veillez à ce que vos enfants ne s'approchent pas de l'appareil. 7)Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce manuel 8)Ne pas brancher ou débrancher avec les mains mouillées.(risque de choc électrique) 9)N'utilisez pas ce produit dans un endroit humide ou chaud.(risque de choc électrique) 10)N'utiliser l'appareil qu'après avoir enfilé les manchettes. (dans le cas contraire elles pourraient être endommagées) | 1)Ne pas donner de coups ou laisser tomber l'appareil. 2)Gardez l'appareil près de vous pour pouvoir l'utiliser facilement. 3)Ouvrez les bottes pneumatiques et veillez à ce que rien ne soit inséré dans la fermeture à glissière. 4)Ne bougez pas et ne marchez pas en portant les jambières. 5)Si un problème ou un défaut est détecté, arrêtez d'utiliser l'appareil. immédiatement et éteignez-le et contactez votre distributeur. 6)Veillez à ce que de l'eau ou des impuretés ne pénètrent pas dans les manchons 7)Après utilisation, vider l'air dans les manchons et garder les dans un lieu propre et sec 8)Ne mettez pas d'autres choses sur ce produit. 9)Débranchez le si vous ne comptez pas l'utiliser sur une longue période. 10) Veillez à ce que les tuyaux d'air ne soient jamais pliés ou pressés. 11)Gardez les manchons à l'écart des aiguilles et des objets coupants. |
|  Nous vous invitons à consulter votre médecin pour vérifier si vous pouvez utiliser cet appareil ou non si vous avez une maladie. | |
| Il est interdit d'utiliser cet appareil si vous portez un dispositif médical. Interdit aux personnes souffrant de maladie ou des états suivants, 1)Maladie aiguë, hypertension 2)Diabète 3)L'homophilie 4)La dermatite atopique 5)Effusion de sang 6)Menstruation 7)Maladie cardiaque 8)Allergie 9)Hémorragie cérébrale 10) Tuberculose 11)Prise d'alcool ou de médicaments 12) Femmes enceintes 13)Tumeurs malignes 14) Mauvais état de santé 15) Fatigue intense 16)Interdiction du médecin traitant Autre type d'interdiction 1)Retirez les objets contenus dans vos poches 2)Consultez un médecin en cas de malaise, éruptions cutanées ou démangeaisons 3)Ne pas laisser les enfants approcher de l'appareil 4)ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle mentionnée dans ce manuel | |

3. Noms de chaque partie

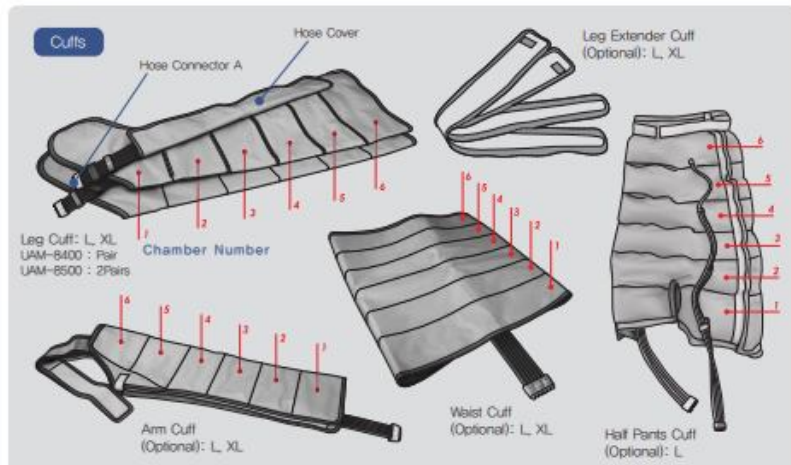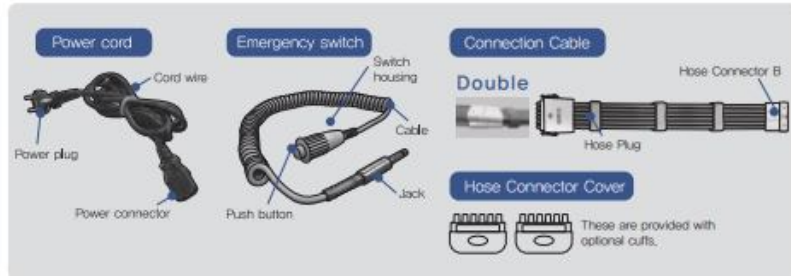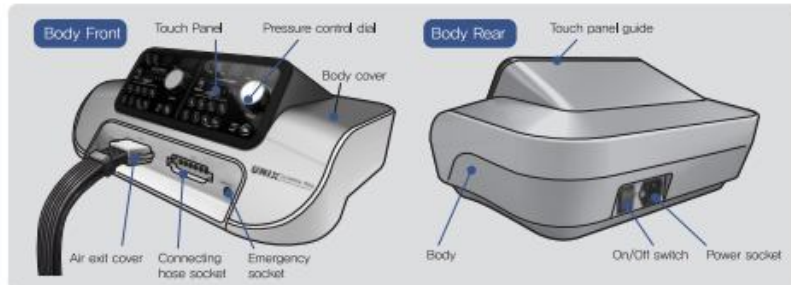

4. Fonctions de l'écran tactile

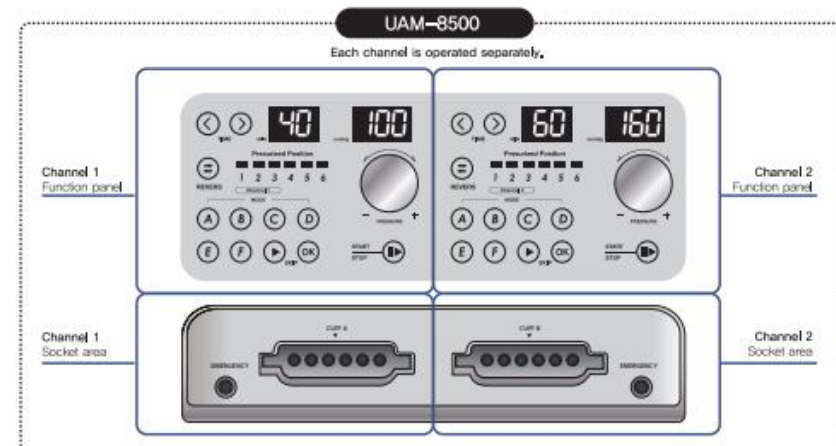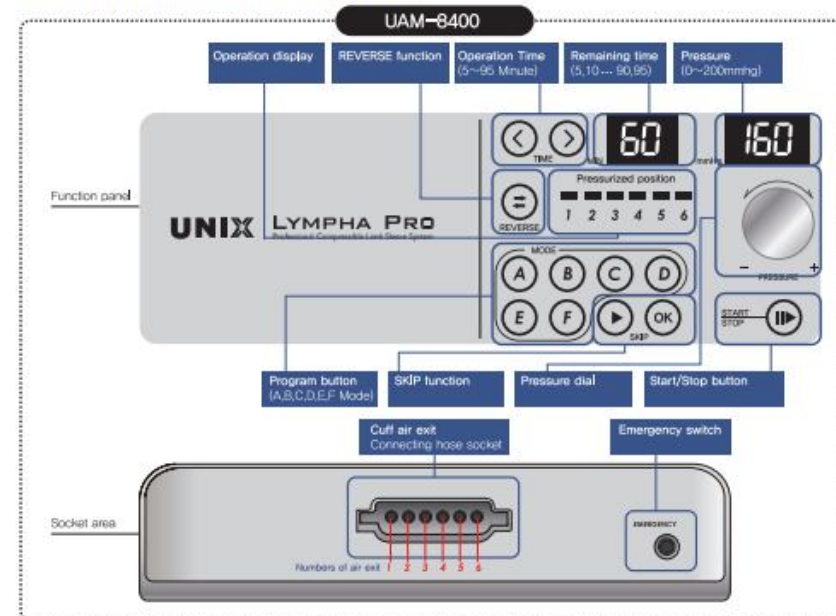

5. Préparation avant utilisation

- 1 Vérifiez l'électricité de votre lieu d'utilisation (230V, 50Hz ou 120V, 60Hz)
- 2 Branchez le connecteur d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'appareil.



- 3 Branchez un cordon d'alimentation dans la prise.
- 4 Connectez l'interrupteur d'urgence à la prise située à l'avant de l'appareil



- 5 Allumez l'interrupteur vert de l'arrière du corps. <O: Off /: On>
L'affichage de la pression clignote et s'arrête lorsque l'appareil est sous tension.




Le bouton POWER est allumé quand vous l'enclanchez vers le haut. Éteignez-le après l'utilisation.

Vérifiez si 2 fusibles de 2A sont en ouvrant le porte fusible(en power off) Remplacez les s'ils sont grillés





- 6 Commencez par connecter deux brassards au câble de connexion double. Ensuite, placer le connecteur dans la prise d'air

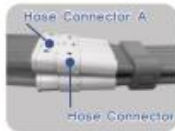


UNIX printed side should be upside.

- 7 Ouvrez la fermeture à glissière et mettez vos jambes dans et fermer jusqu'à la cuisse.

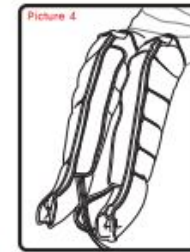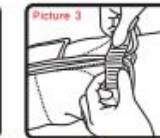



Bien placer le tissu de protection pour ne pas risquer de blesser la peau et ne pas oublier de fermer le velcro.

- 8 Connexion d'une d'extension de jambe. Tirez la fermeture à glissière au maximum et utilisez le velcro pour la resserrer

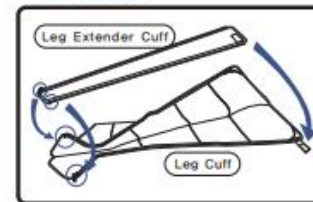

Leg Extender Cuff : Large, XL Size

- 9 Portez le brassard, connectez la sangle et ajustez-le à votre corps.
- 10 Portez le brassard à la taille un peu plus bas que la poitrine pour ne pas exercer de pression et reportez-vous à la figure 6.

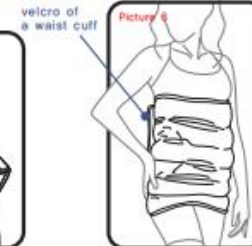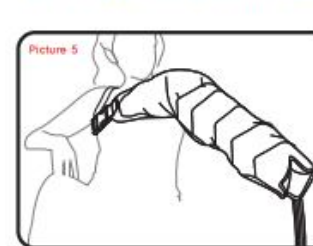

- 11 Portez le demi-brassard un peu plus bas que la poitrine pour ne pas exercer de pression et reportez-vous à la figure 7.
- 12 Vérifiez si toutes les connexions sont serrées et si toutes les opérations sont fluides, puis définissez l'opération.
- 13 Si vous voulez utiliser le brassard ou d'autres poignets, vous devez le connecter au double câble de tuyau d'abord, puis bloquez un côté de celui-ci avec un cache-connecteur de tuyau.




6. MODE OPERATOIRE



- 1 Vérifier que le bouton d'allumage soit enclenché. Configurer la pression en fonction du patient. La pression peut être ajustée à tout moment au cours du traitement. Ne programmer pas une pression élevée en début de traitement
- 2 Choisir un programme. Une lumière s'allume. Le programme reste identique même en cas d'arrêt en cours de traitement
- 3 Programmer le temps de traitement. (jusqu'à 95 min toute les 5min)
- 4 Appuyer sur REVERSE si vous souhaitez changer le sens du mode
- 5 Appuyer sur SKIP si vous souhaitez activer la fonction REVERSE ou inverse. A chaque changement appuyer sur START/STOP

7. MODE


- 1 Voici la charte des différents MODES
- 2 Elle montre les différentes étapes de gonflage et de dégonflage de la chambre 1 à la chambre 6 et le temps pour chacune

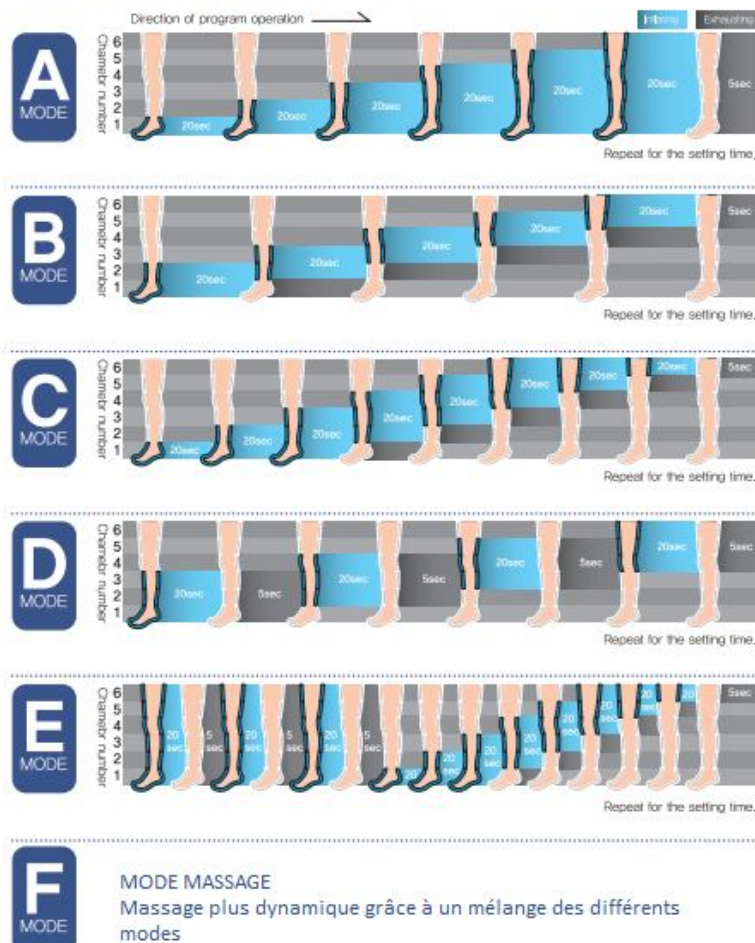

8. REVERSE


REVERSE program is applicable to Mode A, B, C, D only.

- 1 Sélectionner le programme souhaité et appuyer sur REVERSE. Ainsi
- 2 Le mode s'effectuera une fois en avant une fois en arrière

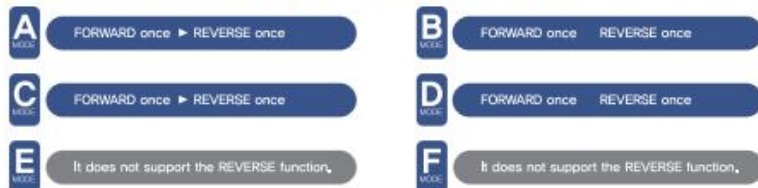

10. SKIP

- 1 Pour les personnes qui ne doivent pas subir de pression sur certaines zones du corps
- 2 L'utilisateur peut choisir les chambres qui ne seront pas gonflées
- 3 Si vous appuyez sur la flèche au dessus de SKIP vous pourrez sélectionner les chambres
- 4 Appuyer sur OK 1 fois pour valider et 2 fois pour annuler
- 5 Pour supprimer tous les SKIP maintenez le bouton OK enfoncé 3 secondes
- 6 La fonction SKIP ne s'applique pas au mode F

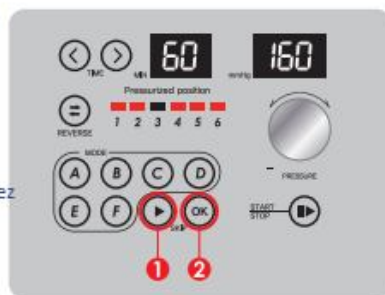

9. LORSQUE LE PROGRAMME EST TERMINE

- Le programme est terminé, le temps est à zéro et les configurations REVERSE et SKIP sont
- 1 sauvegardées par défaut
 - 2 Presser le bouton START/STOP après avoir changer la configuration
 - 3 Appuyer sur le bouton vert pour éteindre l'appareil
 - 4 Garder dans un endroit propre et sec

11. Maintenance

Stockage et entretien de l'appareil

- 1 Garder dans un lieu propre et sec
- 2 Maintenir à l'abris des chocs
- 3 Débrancher l'appareil avant de le nettoyer
- 4 Nettoyer avec un chiffon propre
- 5 Sécher après nettoyage
- 6 Ne pas laisser les enfants s'approcher du dispositif

Stockage et entretien des bottes

- 1 Nettoyer les bottes avec un chiffon humide et sécher
- 2 Les garder dans un lieu propre et sec
- 3 Ne pas démarrer l'appareil sans que les bottes aient été enfilées
- 4 Maintenir loin d'objets coupants ou chaud ou froid
- 5 Assurez vous que les tubes ne soient pas pliés

12. A/S

Vérifiez les points suivants avant de contacter votre distributeur

| Débrancher l'appareil | Vérifier les points suivants | Solutions |
|---|--|--|
| 1 L'appareil ne s'allume pas | Problème de courant? | Attendez que le courant revienne |
| | Vérifier que le câble d'alimentation soit branché | Branchez l'appareil |
| 2 L'appareil s'arrête en cours de traitement | Vérifier que la prise est adaptée... .. | (Utilisez une autre prise) |
| | Utiliser une autre prise | Reessayez d'enclancher le bouton POWER |
| 3 L'appareil émet un bruit anormal | Est il posé à plat..... | Mettez l'appareil sur une surface plane |
| | Est il endommagé?..... | Contactez le distributeur |
| 4 Pas ou peu de pression | Les tubes sont ils tordus | Dépliez les tubes |
| | Les manchons sont ils tordus | Dépliez les manchons |
| 5 Les boutons ne répondent pas | Avez vous appuyé trop rapidement | Appuyez plus lentement sur les boutons |
| 6 Le programme ne fonctionne pas | Avez vous suivi les instructions de programmations | Relisez les instructions de programmation et si le problème persiste, contactez votre distributeur |

13. CARTE DE GARANTIE

Durée de vie

Appareil: 10ans

Manchons : 3 ans

| Warranty Card | |
|-------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | Compressible Limb Sleeve System |
| Modèle | UAM-8400/8500 |
| Date d'achat | |
| Durée de garantie | 1 année |