

KIT DE RAMPE 101 PLATE-FORME

Distribué par  IDENTITES
Articles pour le bien-être et l'autonomie


PLATEFORMES EXCELLENT SYSTEMS

REF. 825100 & 825101




5 708066 002130

Dimensions

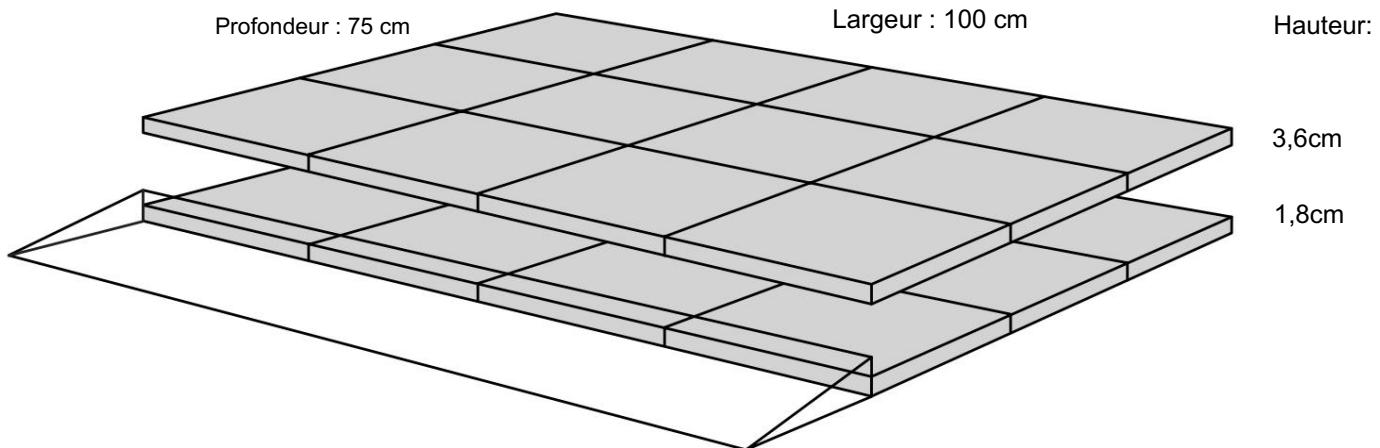

Construit avec le kit de rampe 1, la hauteur peut être ajustée jusqu'à 5,2 cm

Inclus

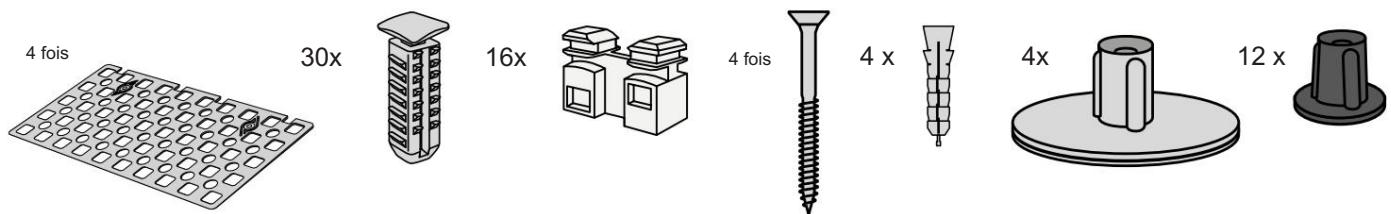

Monté sous la plate-forme





Design Danois Pat. En attente. et produit au Danemark par Excellent Systems A/S








RÉGLAGES EN HAUTEUR


La clé de réglage égalise la différence de hauteur entre la plate-forme et la rampe.

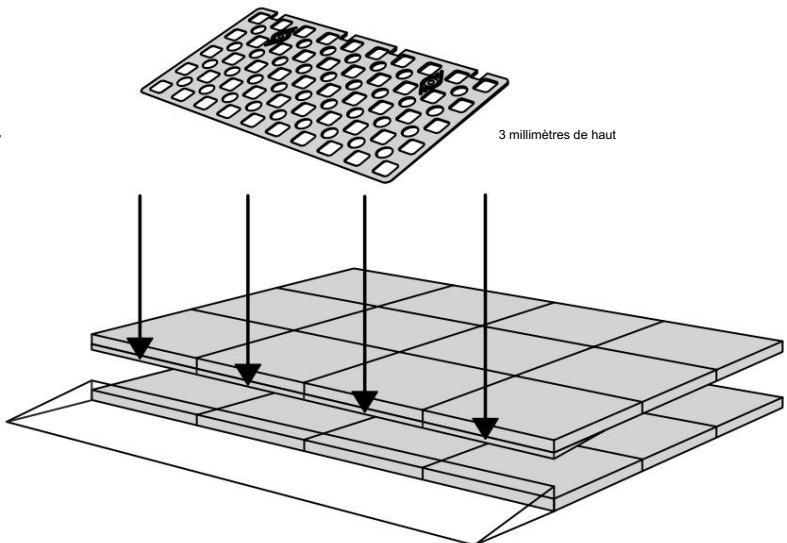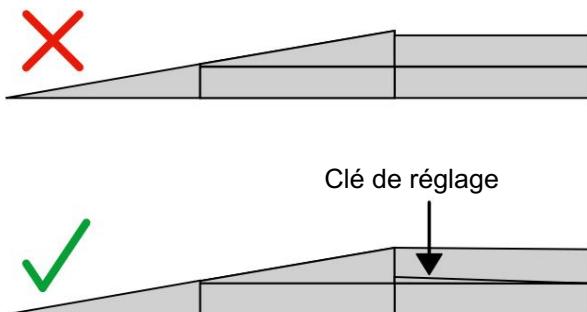

Lorsque vous connectez une plate-forme et une rampe, retirez l'ajusteur de rampe de la rampe et utilisez-le pour régler la plate-forme comme illustré ici :

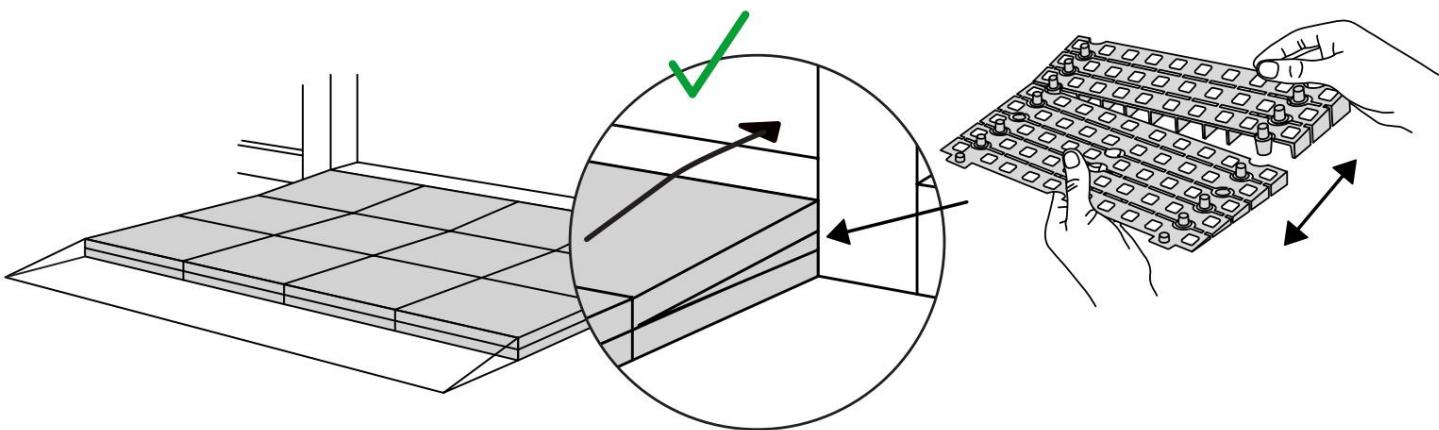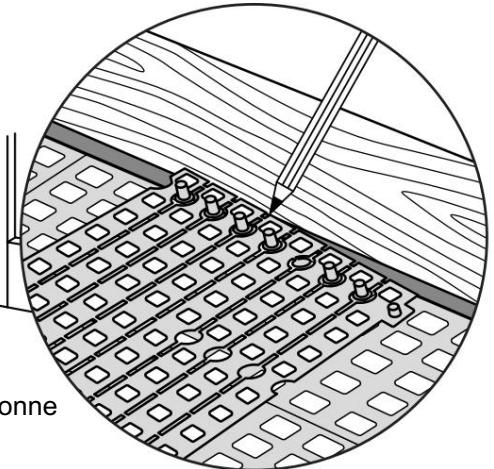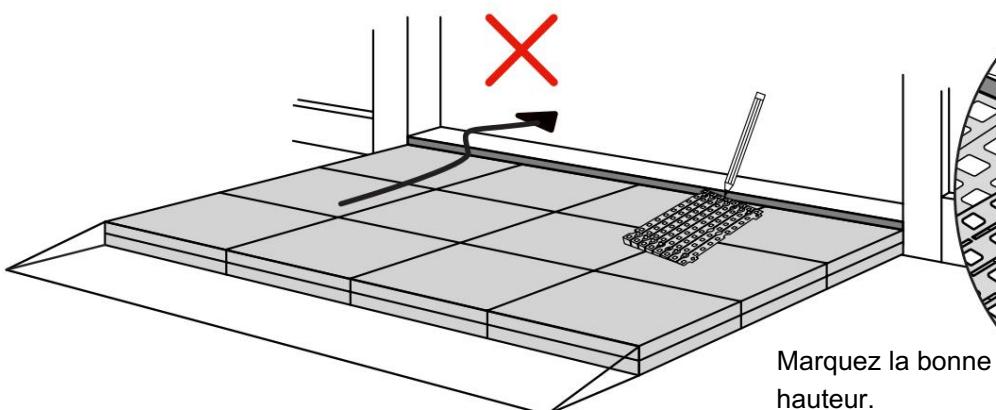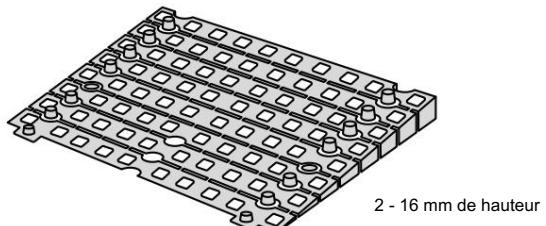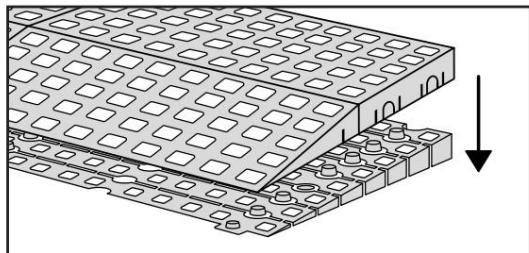

MONTAGE AVEC SERRURES

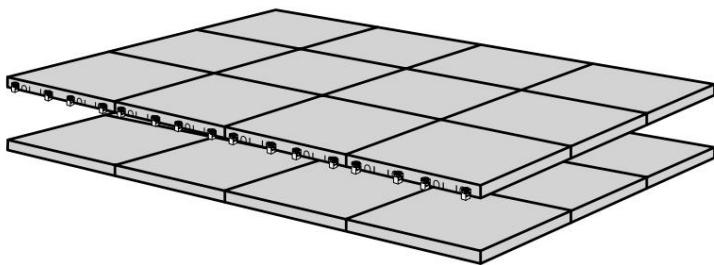


16x




L'horloge

Comment connecter le KIT et la plate-forme :

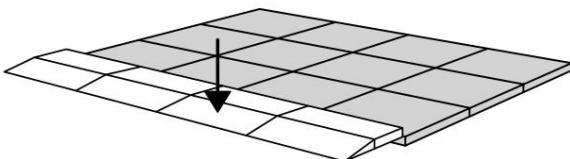


Serrures dans le KIT de rampe :

Voir les instructions du KIT pour le placement des verrous dans le KIT de rampe.


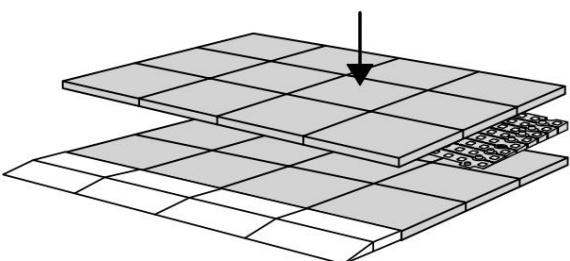


Serrures dans la plate-forme :
S-Lock est monté sur la
couche supérieure.

30x

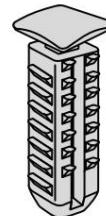


Verrouillage en T

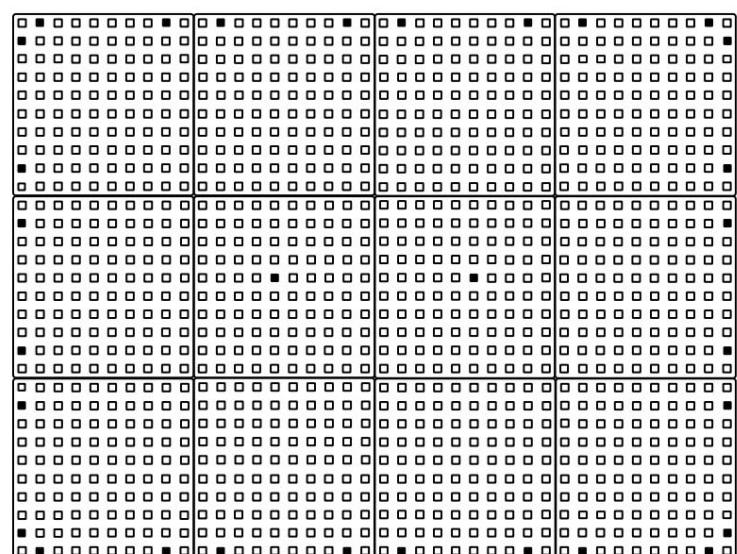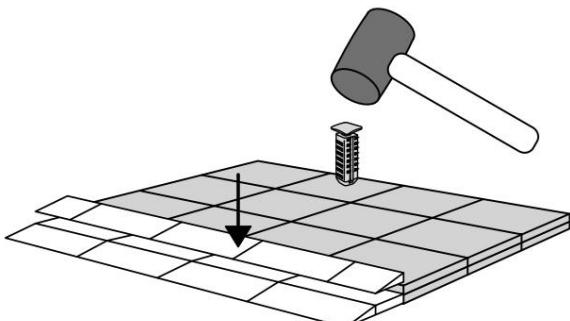


FIXATION AVEC PATINS DE MONTAGE

Intérieur:

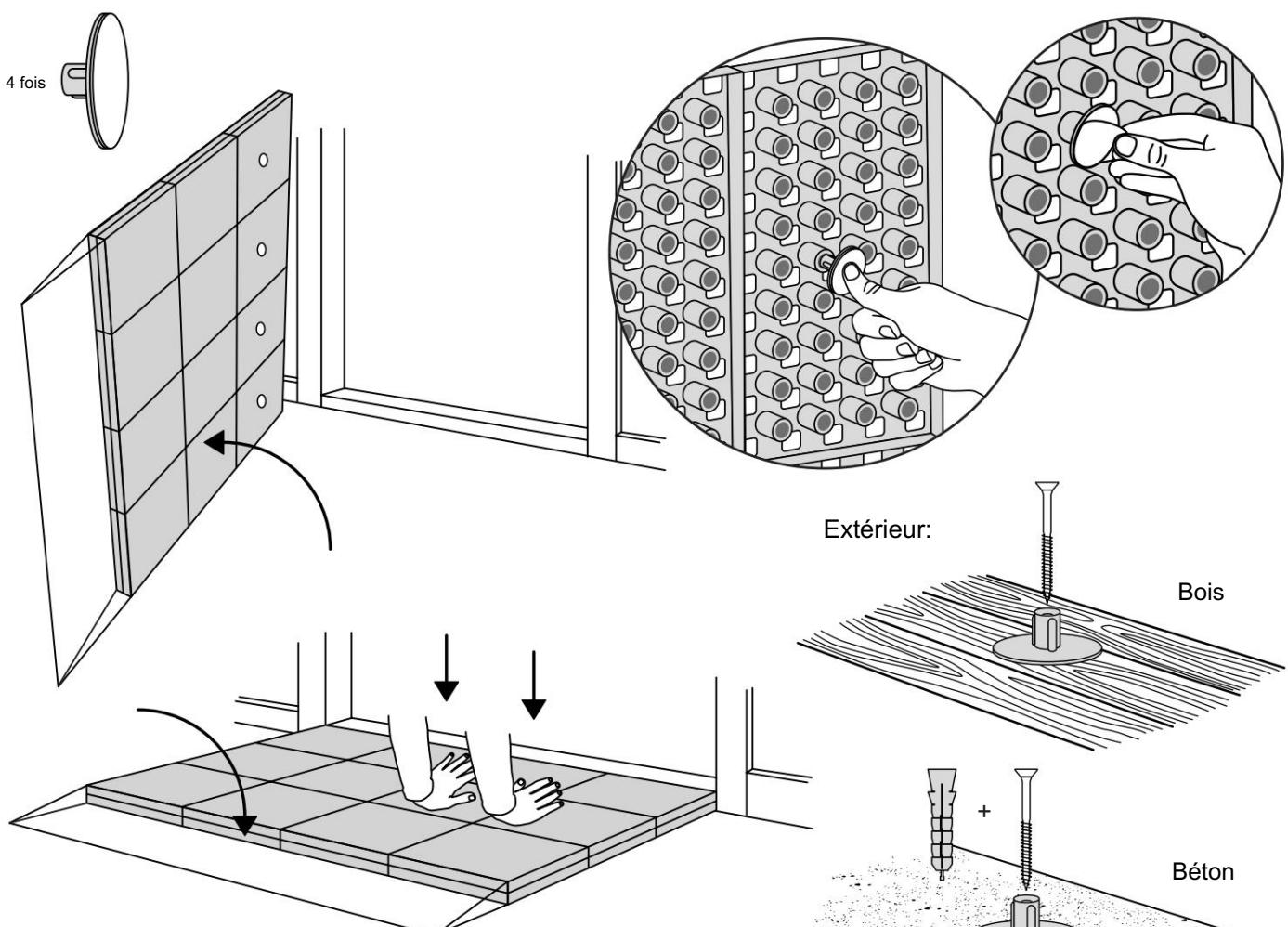


MONTAGE AVEC BUTÉES

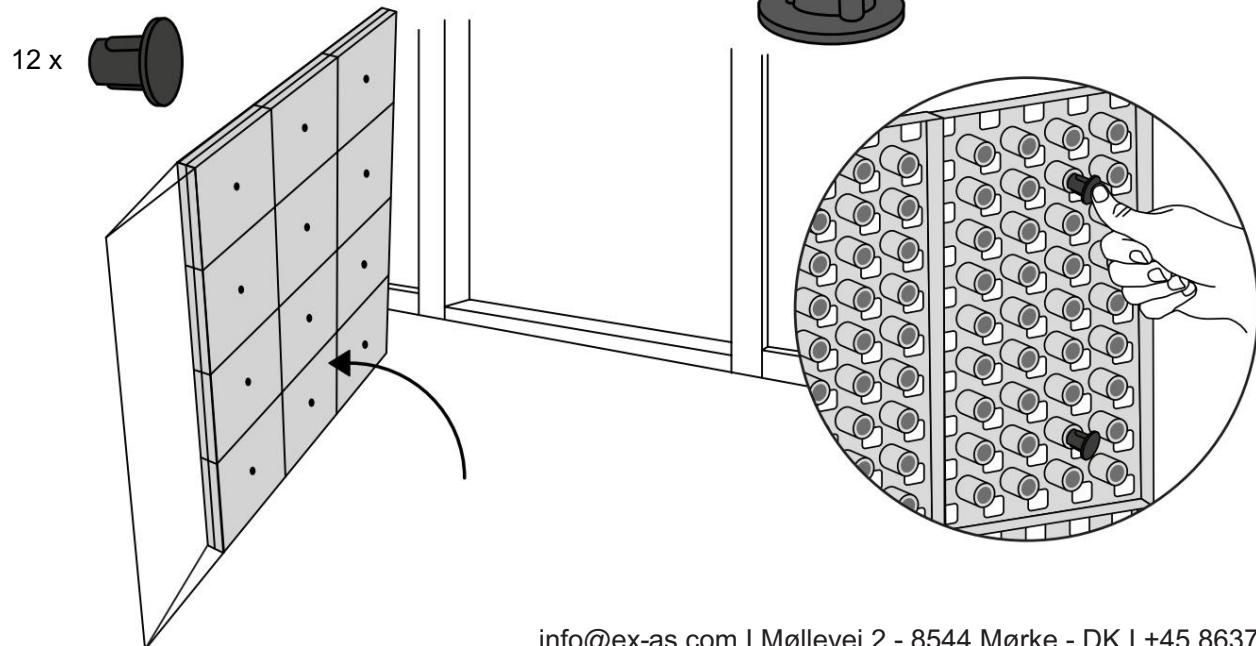

info@ex-as.com | Møllevej 2 - 8544 Mørke - DK | +45 86377133


RAMP KIT 101 PLATFORM

Distributed by  **IDENTITÉS**
Articles pour le bien-être et l'autonomie

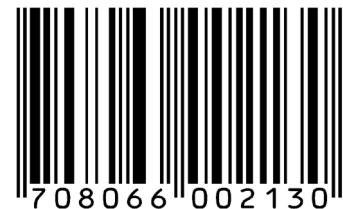


PLATFORM KIT
REF. 825100 & 825101

Dimensions

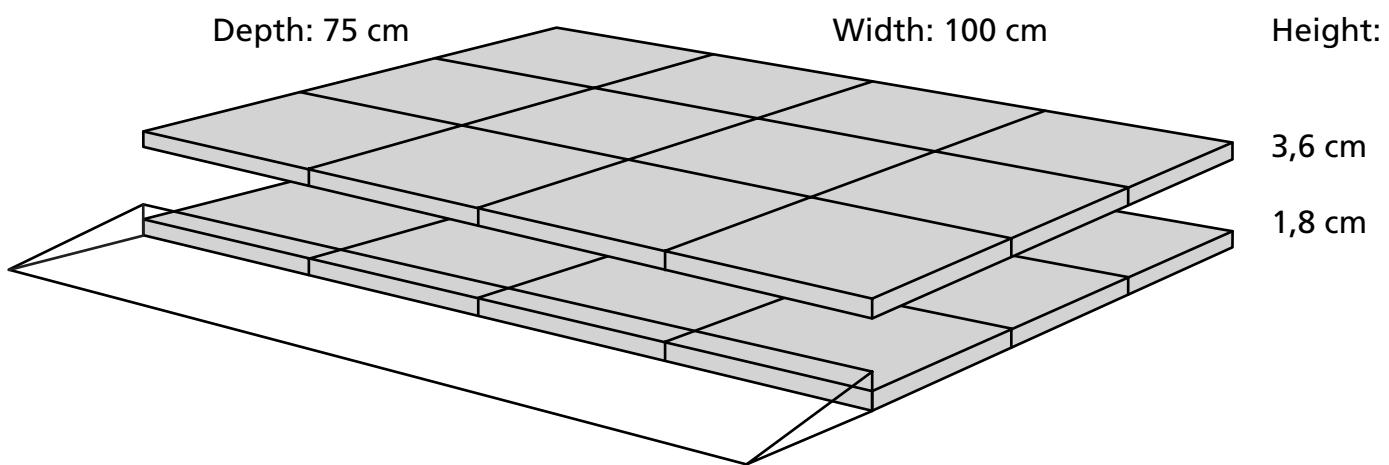

Build together with the Ramp Kit 1, the height can be adjusted up to 5,2 cm

Included

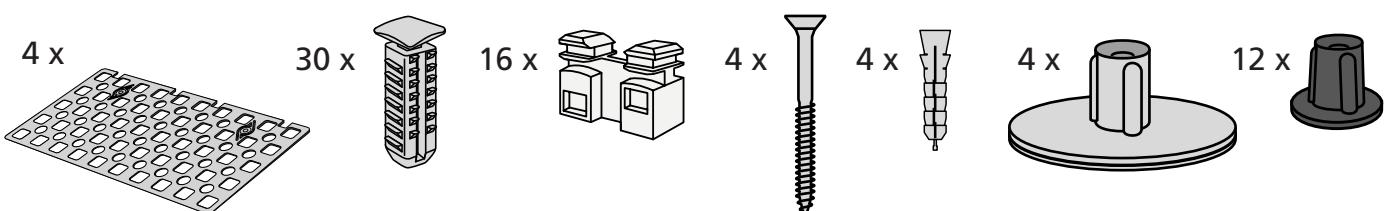

Mounted under the platform





Danish Design Pat. Pend. and produced
in Denmark by Excellent Systems A/S







HEIGHT ADJUSTMENTS


The Adjustment Key equalizes the height difference between platform and ramp.

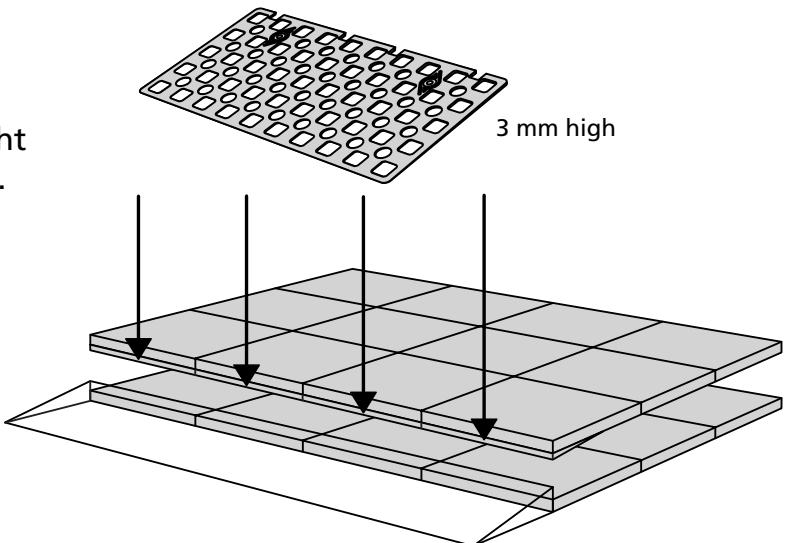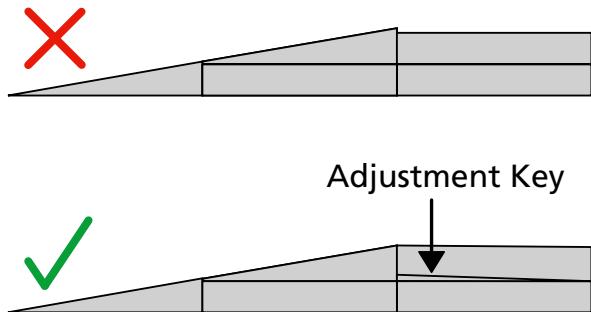

When you connect a **platform** and a **ramp**, remove the **Ramp Adjuster** from the ramp, and use it to adjust the platform as shown here:

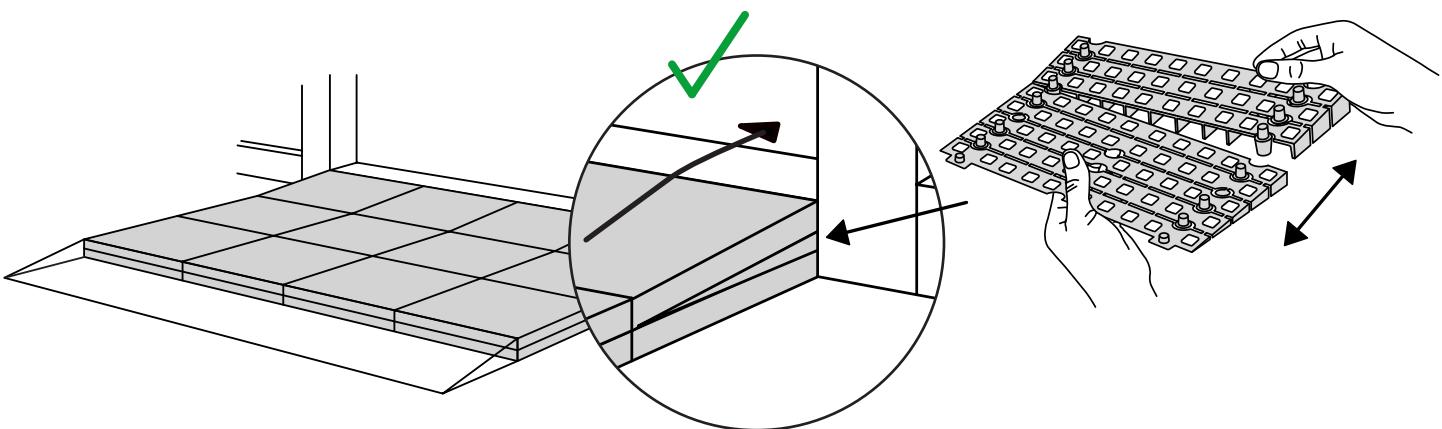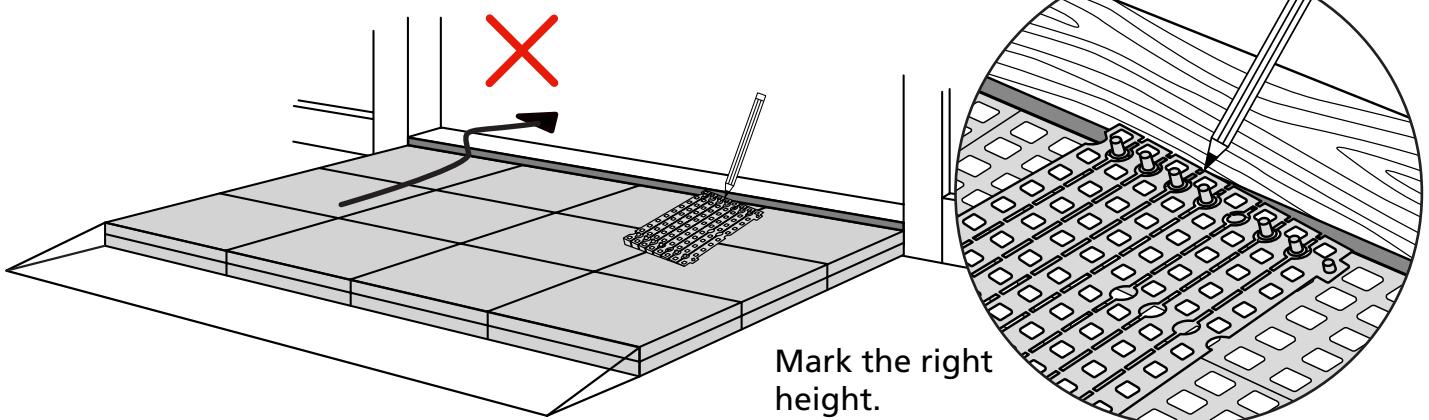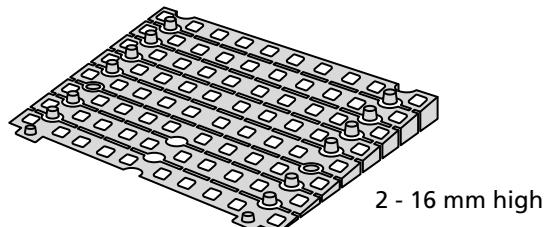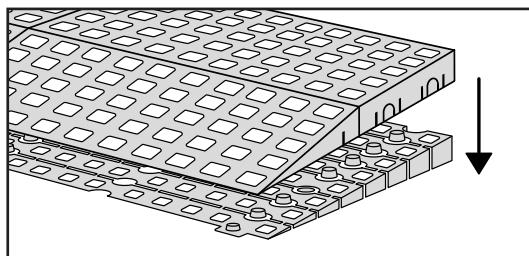

MOUNTING WITH LOCKS

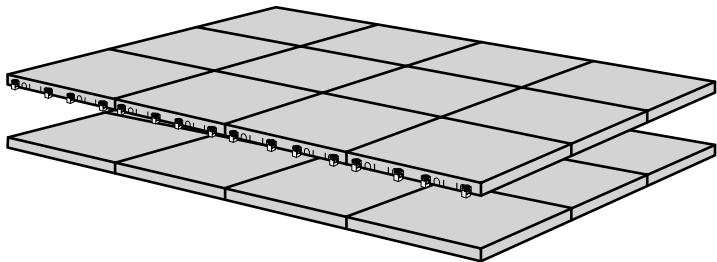


16 x




C-Lock

How to connect KIT and Platform:

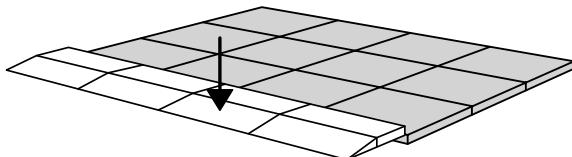


Locks in Ramp KIT:

See KIT instruction for placement
of Locks in the Ramp KIT.


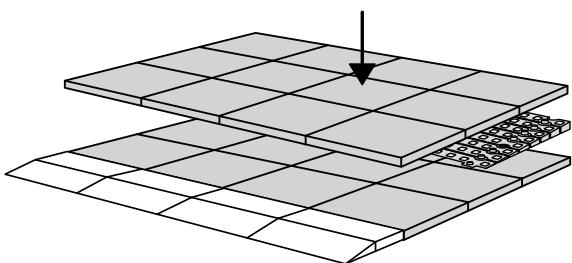


Locks in platform:
S-Lock is mounted
on the top layer.

30 x

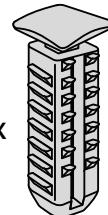


T-Lock

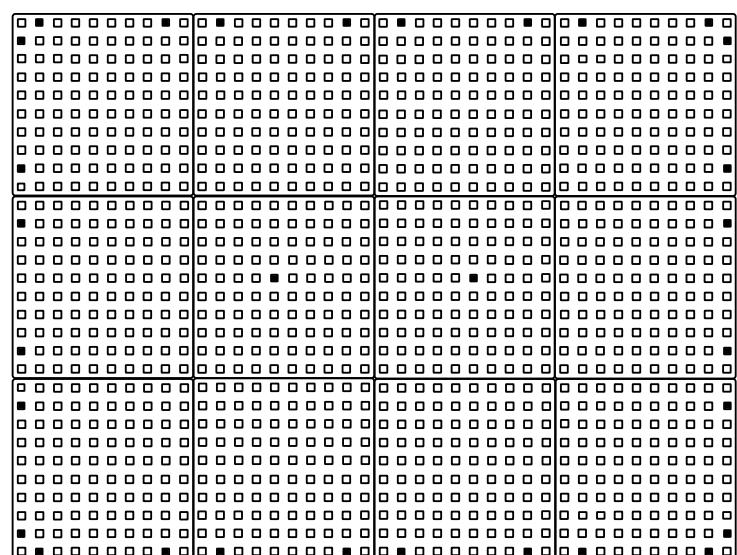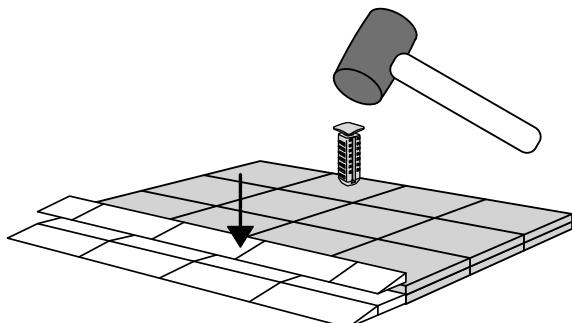


FASTENING WITH MOUNTING PADS


Indoor:

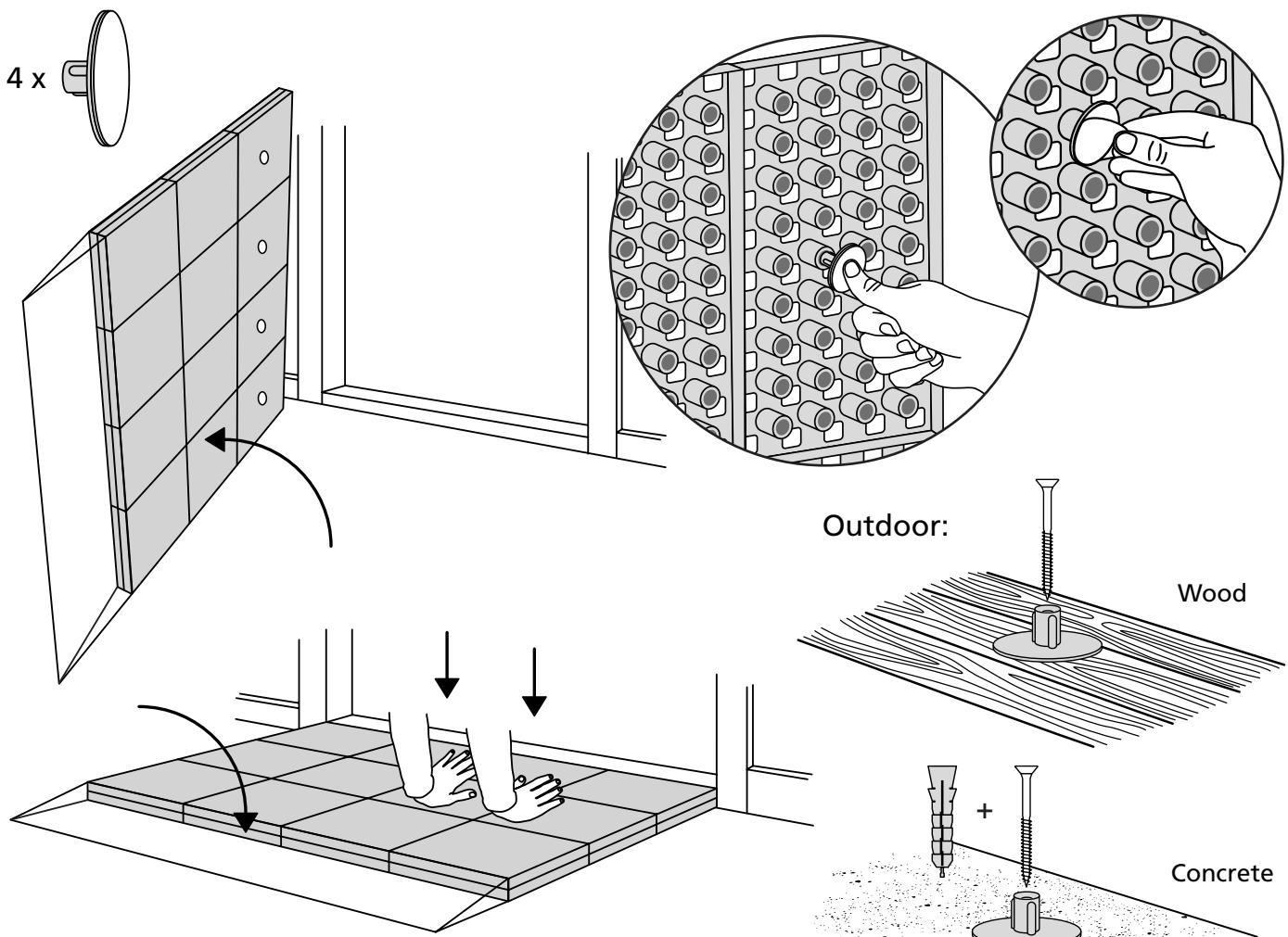

Outdoor:

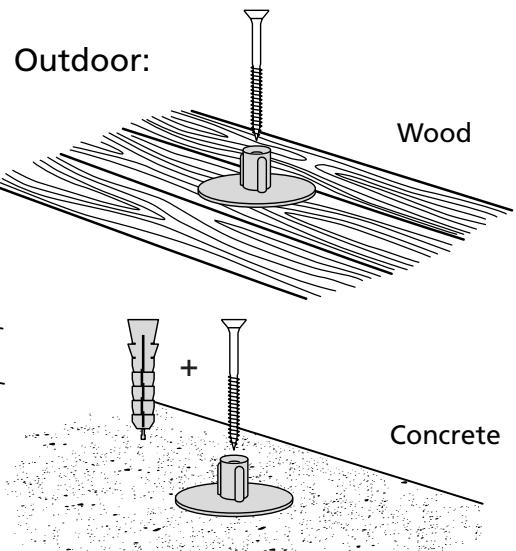

MOUNTING WITH STOPPERS

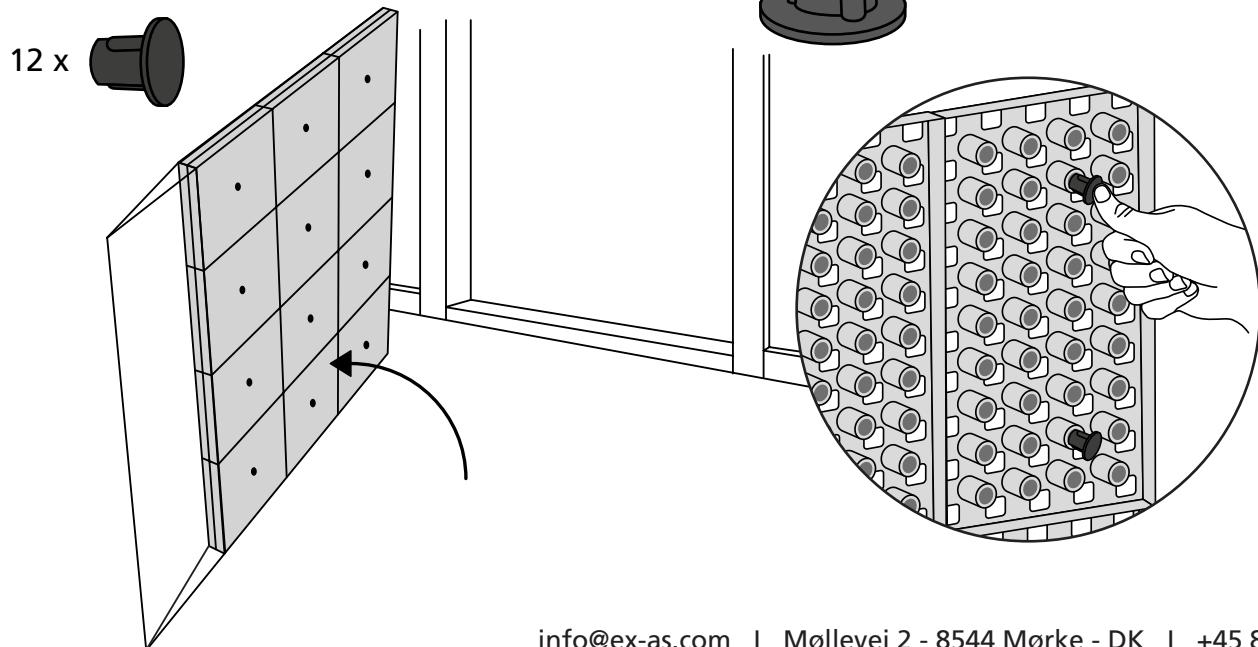

info@ex-as.com | Møllevej 2 - 8544 Mørke - DK | +45 86377133