

KIT RAMPE 5 PLATEFORMES

Distribué par  **IDENTITÉS**
Articles pour le bien-être et l'autonomie

PLATEFORMES EXCELLENT SYSTEMS
REF. 825108 & 825109



Dimensions

Profondeur : 75 cm


Largeur : 75 cm

Hauteur:

18cm

16,2cm


14,4cm

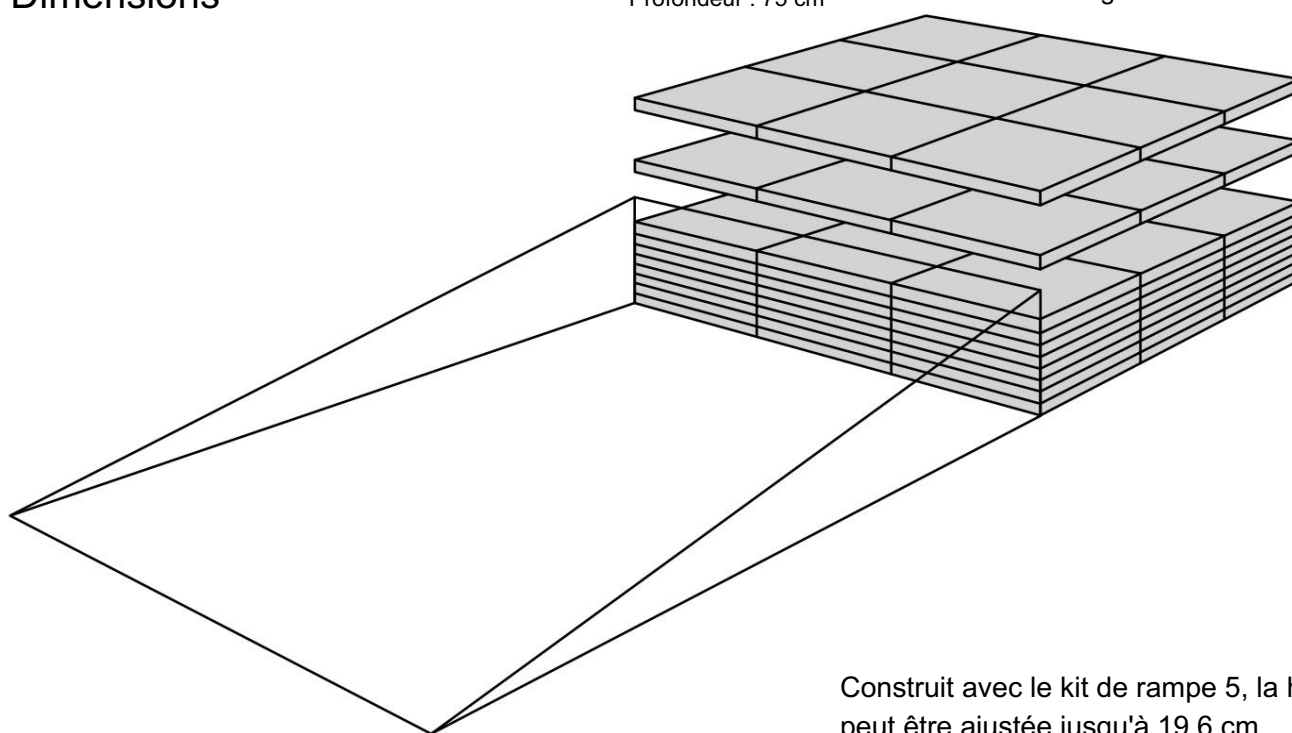


Construit avec le kit de rampe 5, la hauteur peut être ajustée jusqu'à 19,6 cm

Inclus

3x

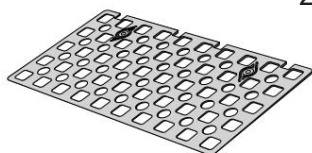

25x

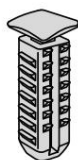

24x




3x



3x



3x

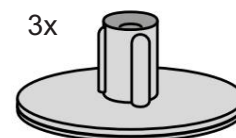

9x





Monté sous la plate-forme




Design Danois Pat. En attente. et produit au Danemark par Excellent Systems A/S

RÉGLAGES EN HAUTEUR


La clé de réglage égalise la différence de hauteur entre la plate-forme et la rampe.

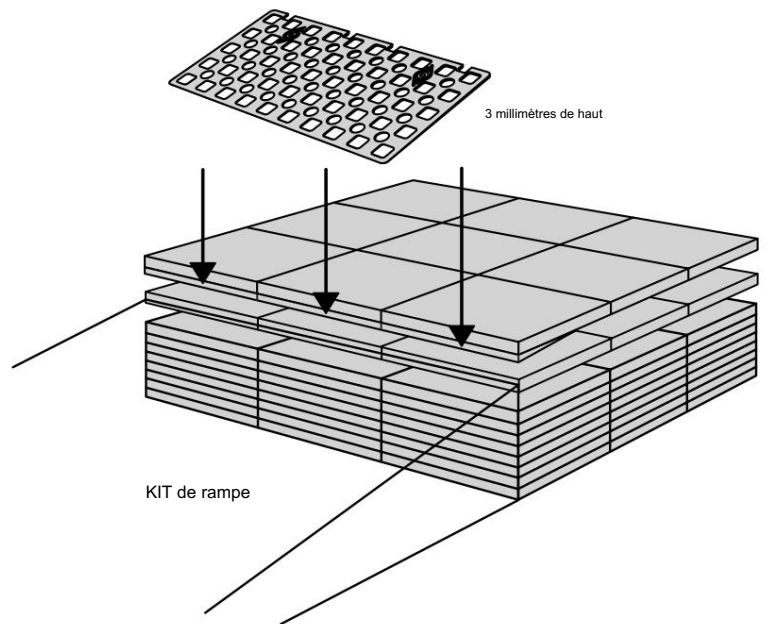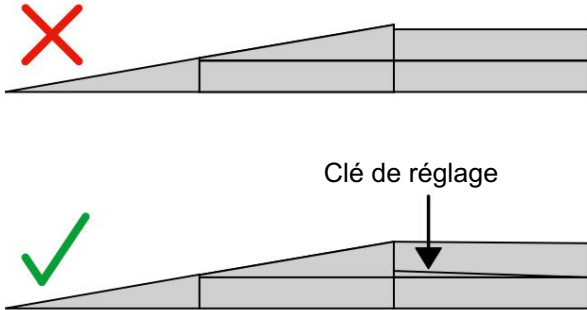

Lorsque vous connectez une plate -forme et une rampe, retirez l' ajusteur de rampe de la rampe et utilisez-le pour régler la plate-forme comme illustré ici :

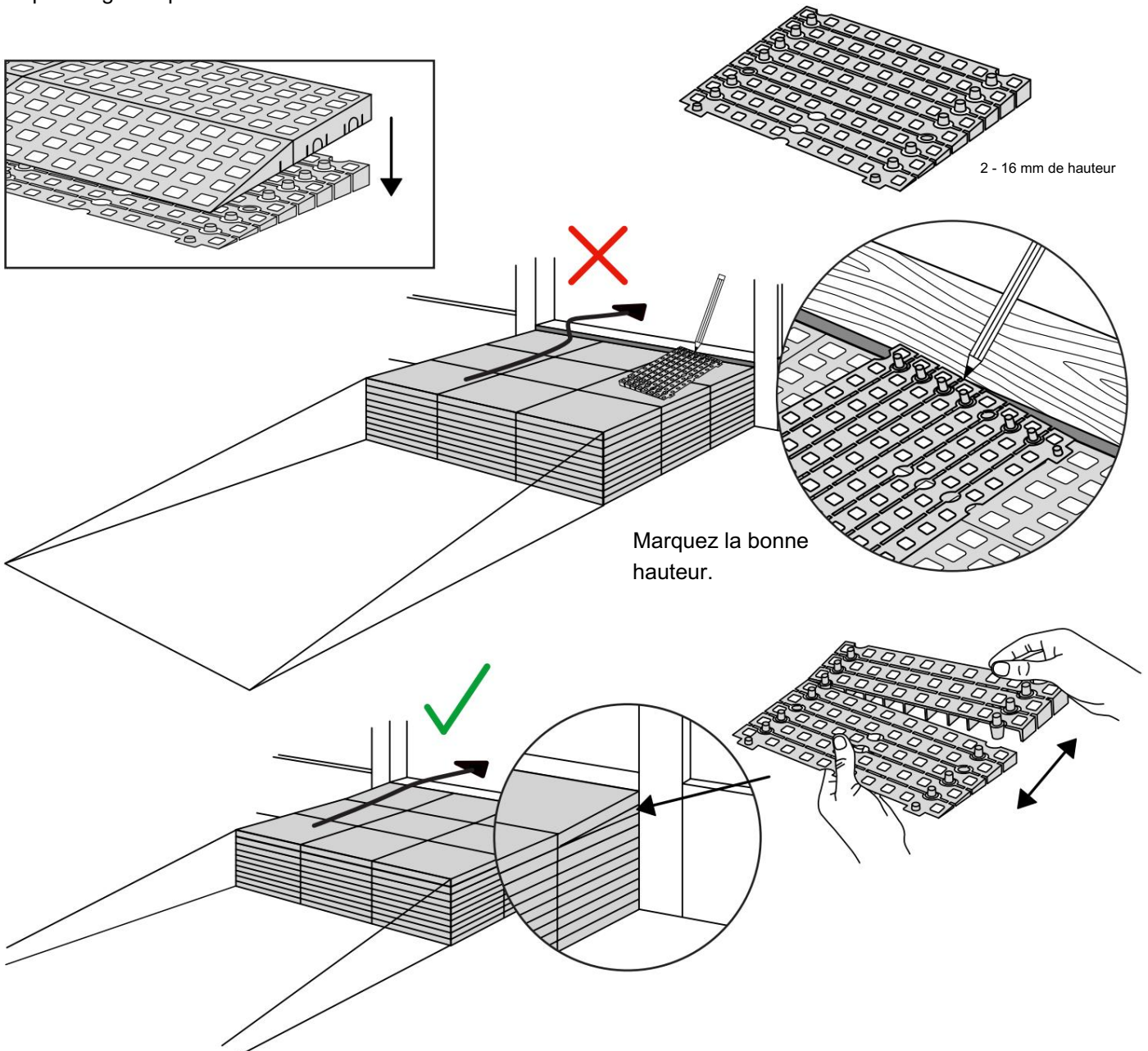

MONTAGE AVEC SERRURES

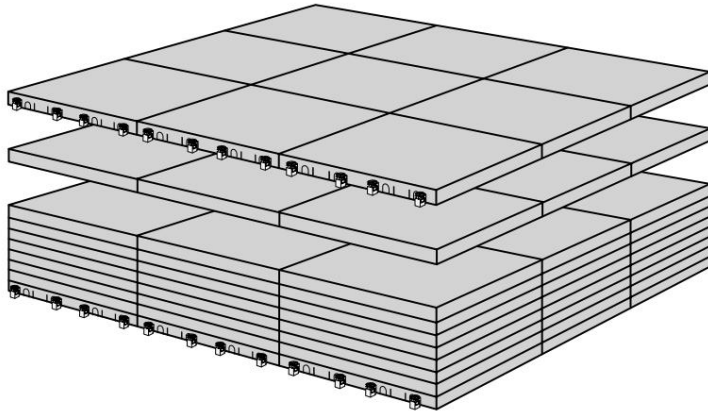


24x




L'horloge

Comment connecter le KIT et la plate-forme :

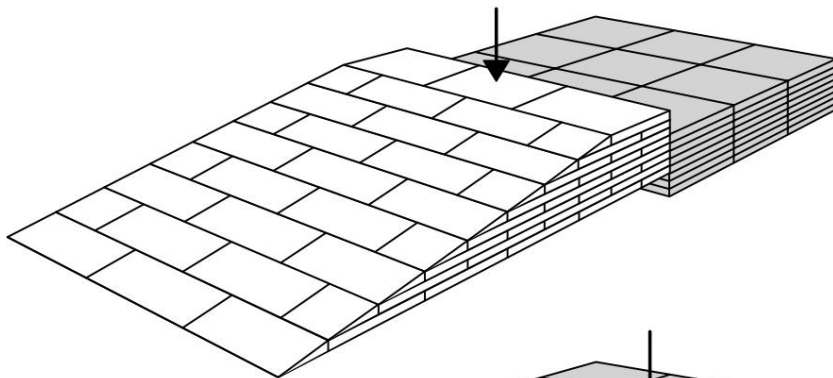

Serrures dans le KIT de rampe :


Voir les instructions du KIT pour le placement des verrous dans le KIT de rampe.

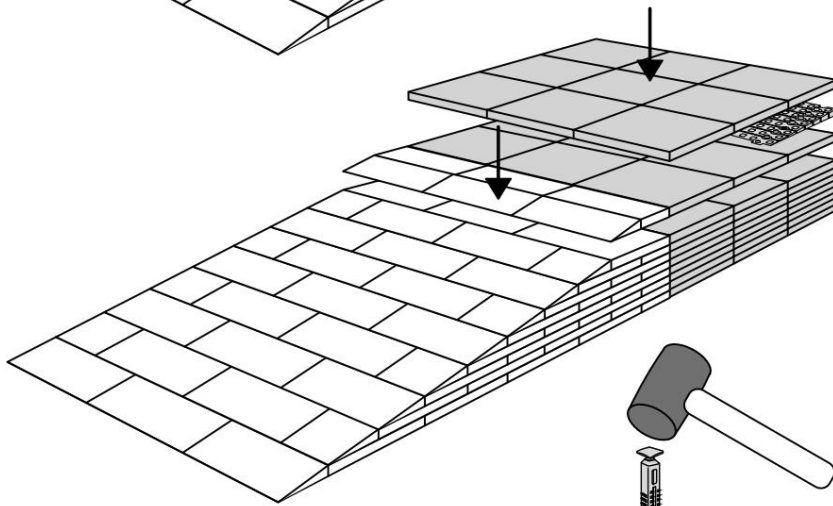



Serrures dans la plate-forme :
S-Lock est monté sur la
couche supérieure.

25x

Utiliser un marteau en caoutchouc
(Non inclus)


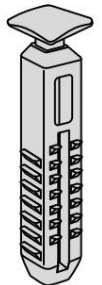


Verrouillage en S

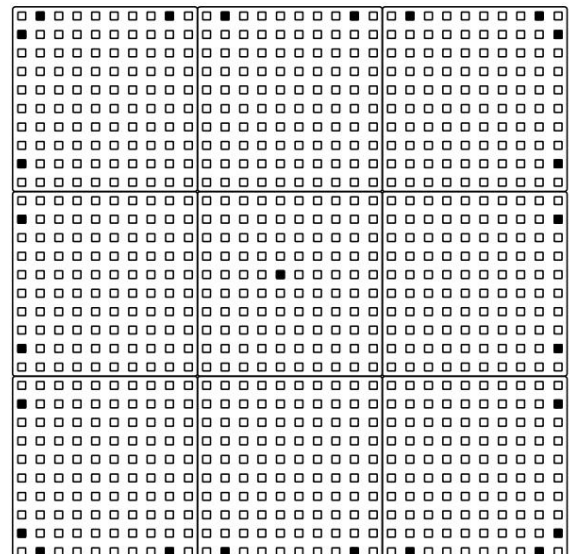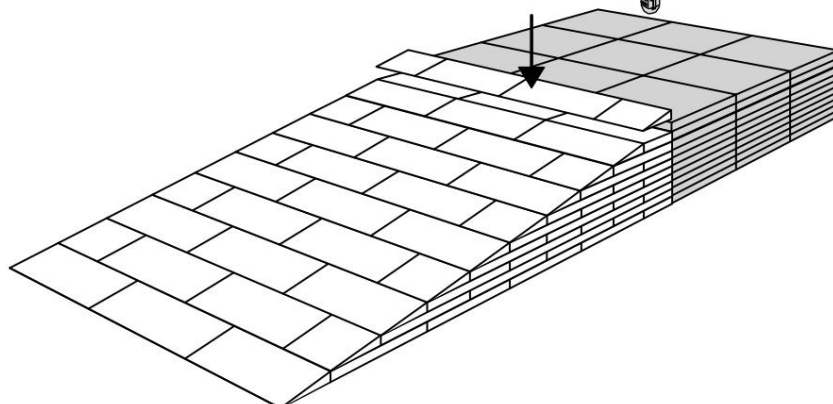


FIXATION AVEC PATINS DE MONTAGE


Intérieur:

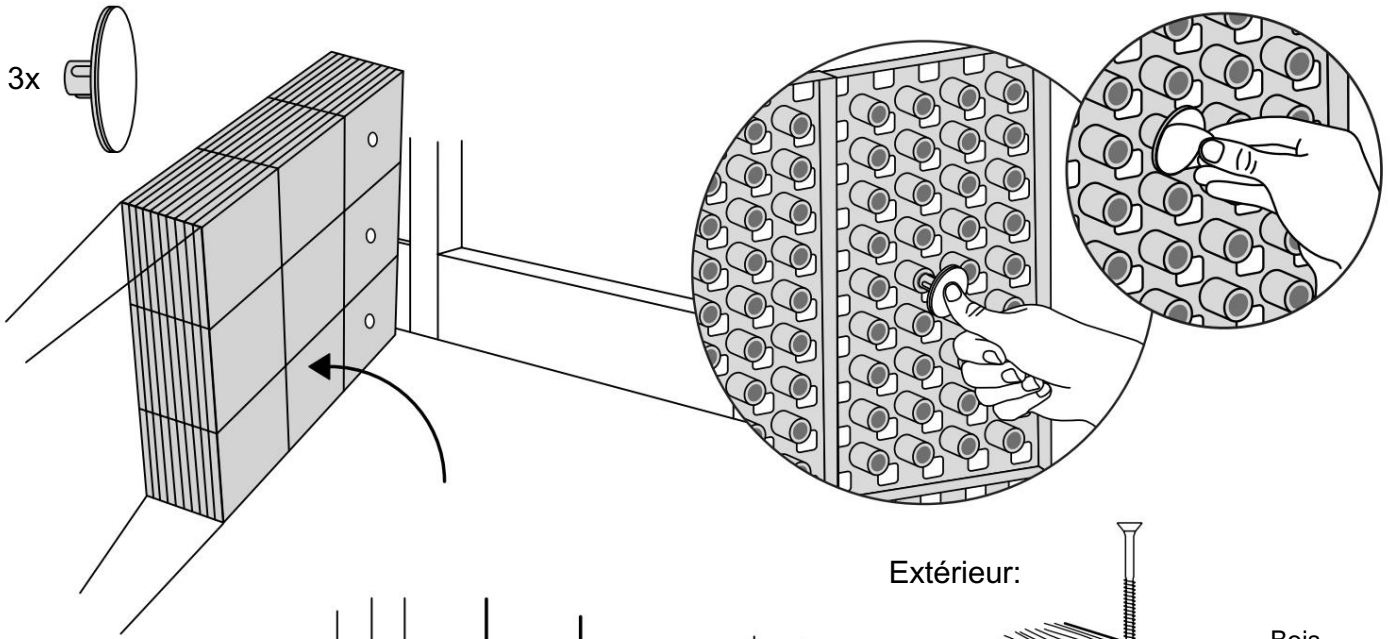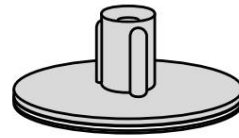


Extérieur:

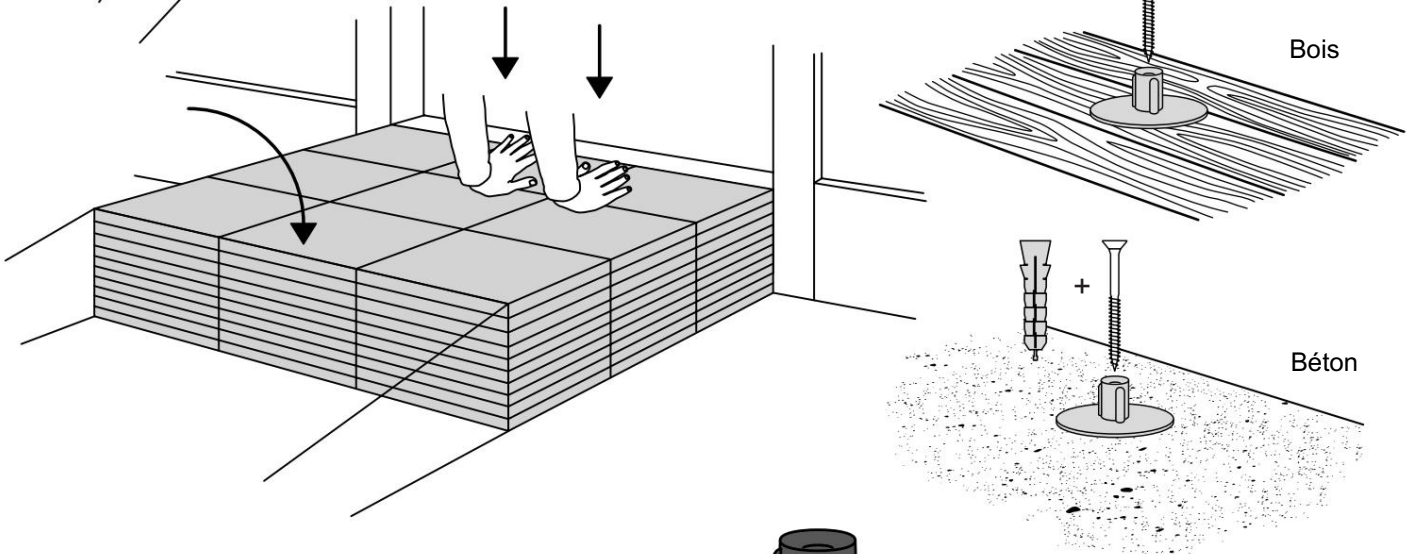

MONTAGE AVEC BUTÉES

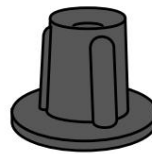


9x

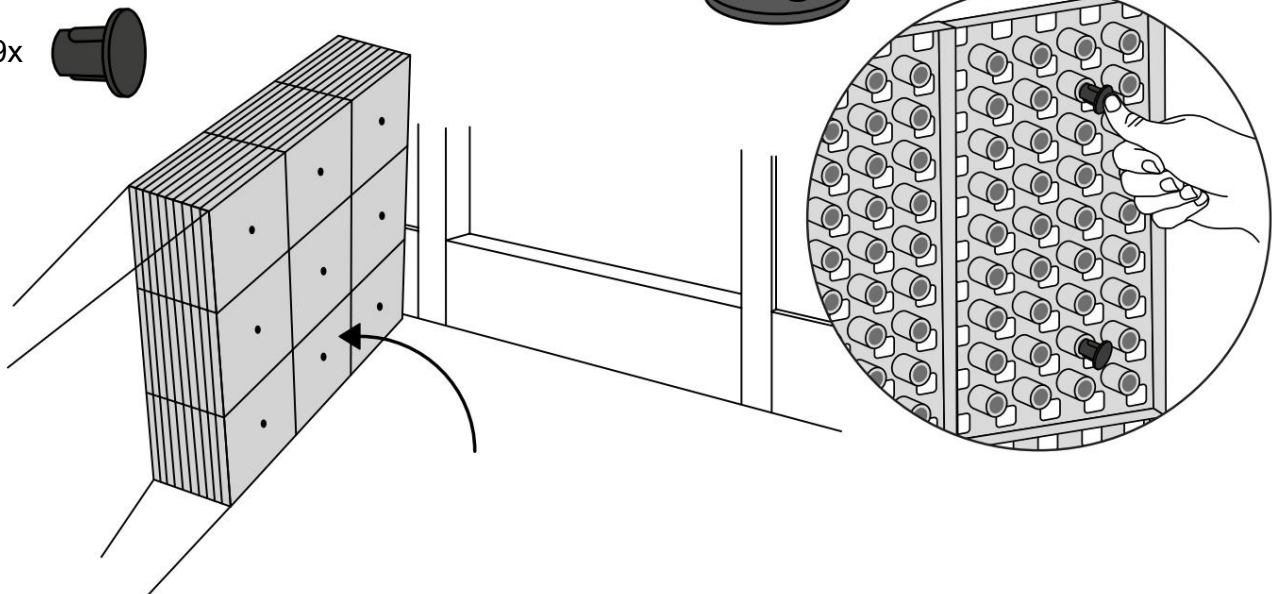

RAMP KIT 5 PLATFORM

Distributed by  **IDENTITÉS**
Articles pour le bien-être et l'autonomie

PLATFORM KIT
REF. 825108 & 825109

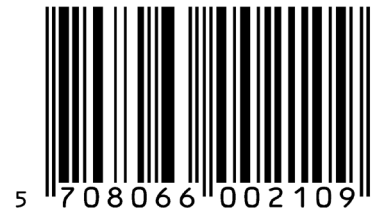

Dimensions

Depth: 75 cm


Width: 75 cm

Height:

18 cm

16,2 cm


14,4 cm

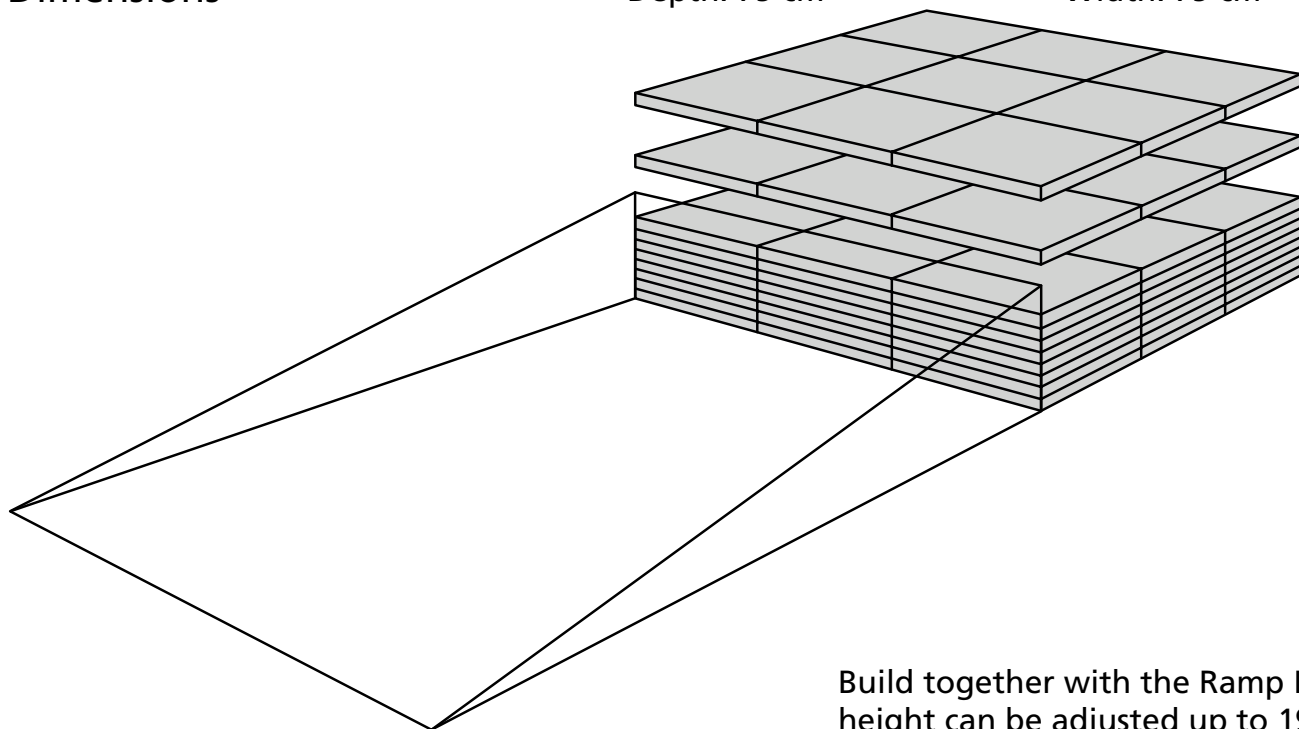


Build together with the Ramp Kit 5, the height can be adjusted up to 19,6 cm

Included

3 x

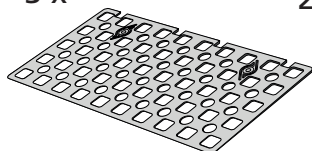


25 x

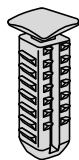

24 x




3 x

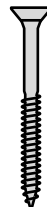

3 x



3 x

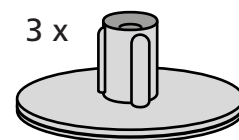

9 x



Mounted under the platform





Danish Design Pat. Pend. and produced
in Denmark by Excellent Systems A/S




HEIGHT ADJUSTMENTS



The Adjustment Key equalizes the height difference between platform and ramp.

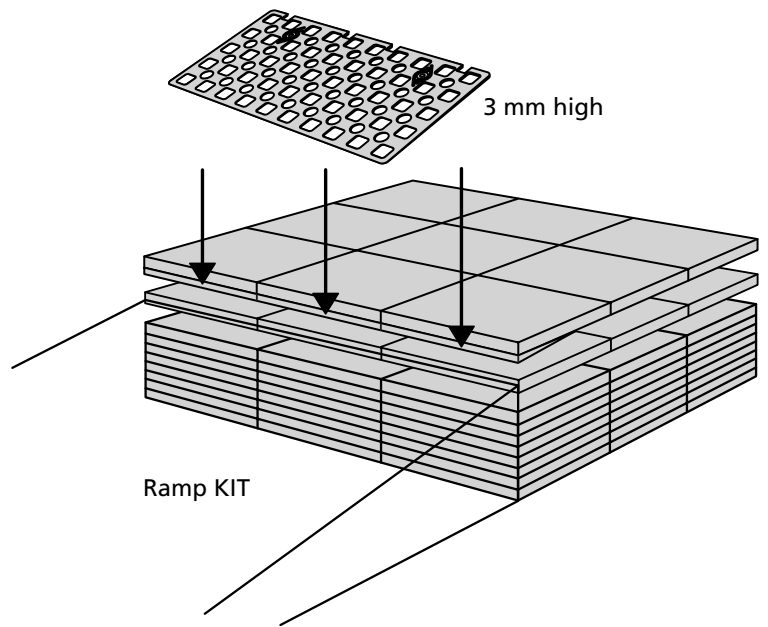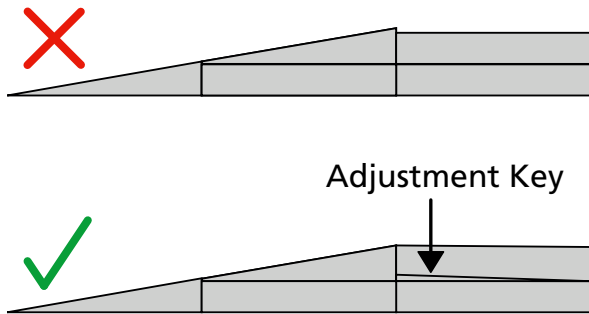

When you connect a **platform** and a **ramp**, remove the **Ramp Adjuster** from the ramp, and use it to adjust the platform as shown here:

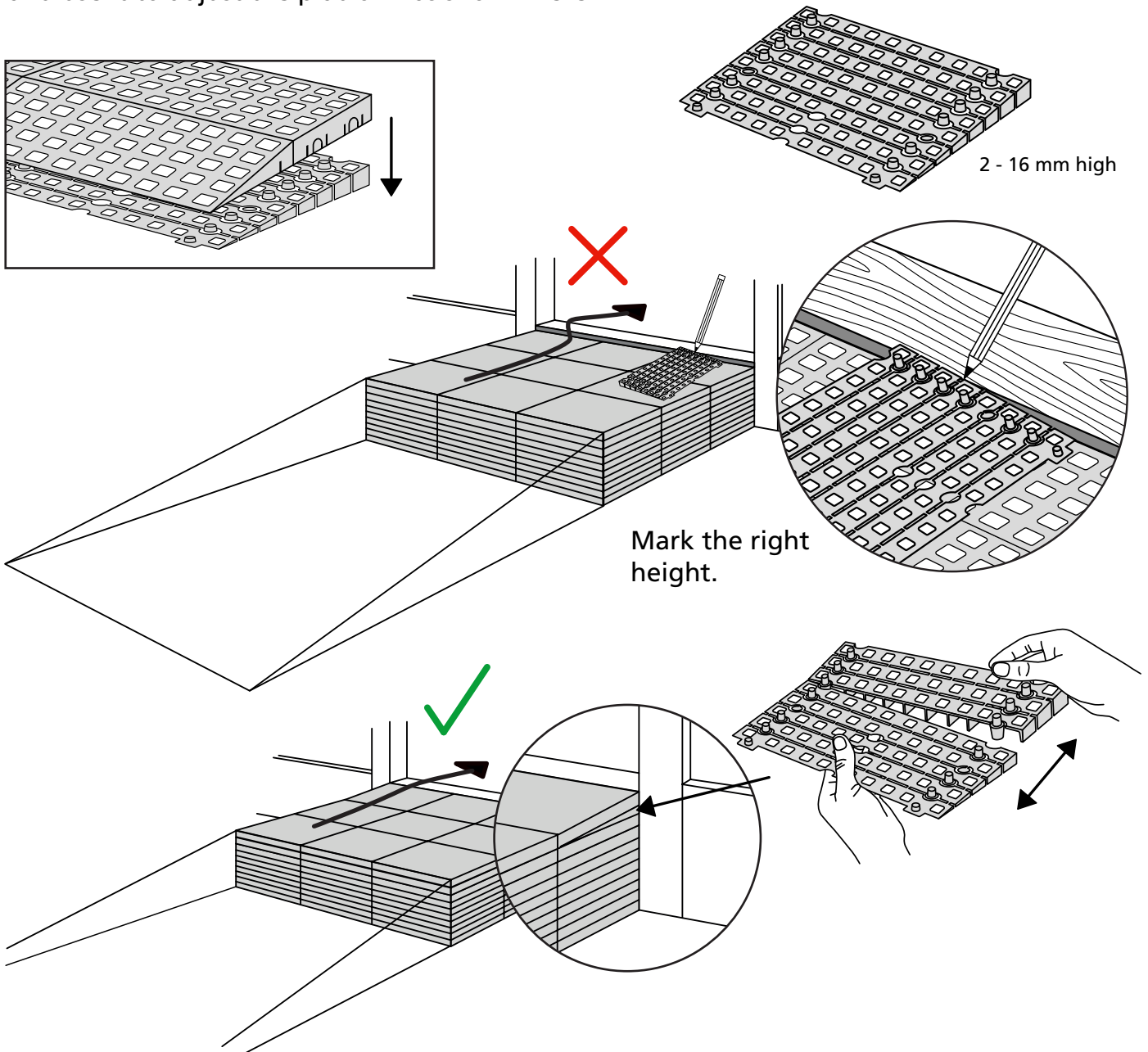


MOUNTING WITH LOCKS

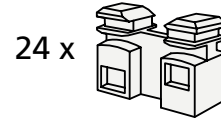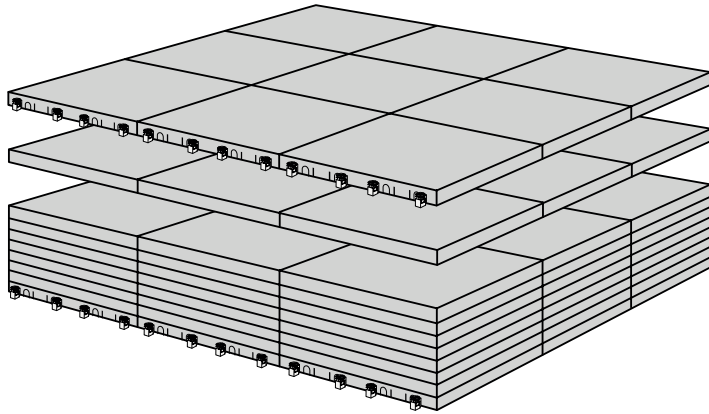

C-Lock


How to connect KIT and Platform:

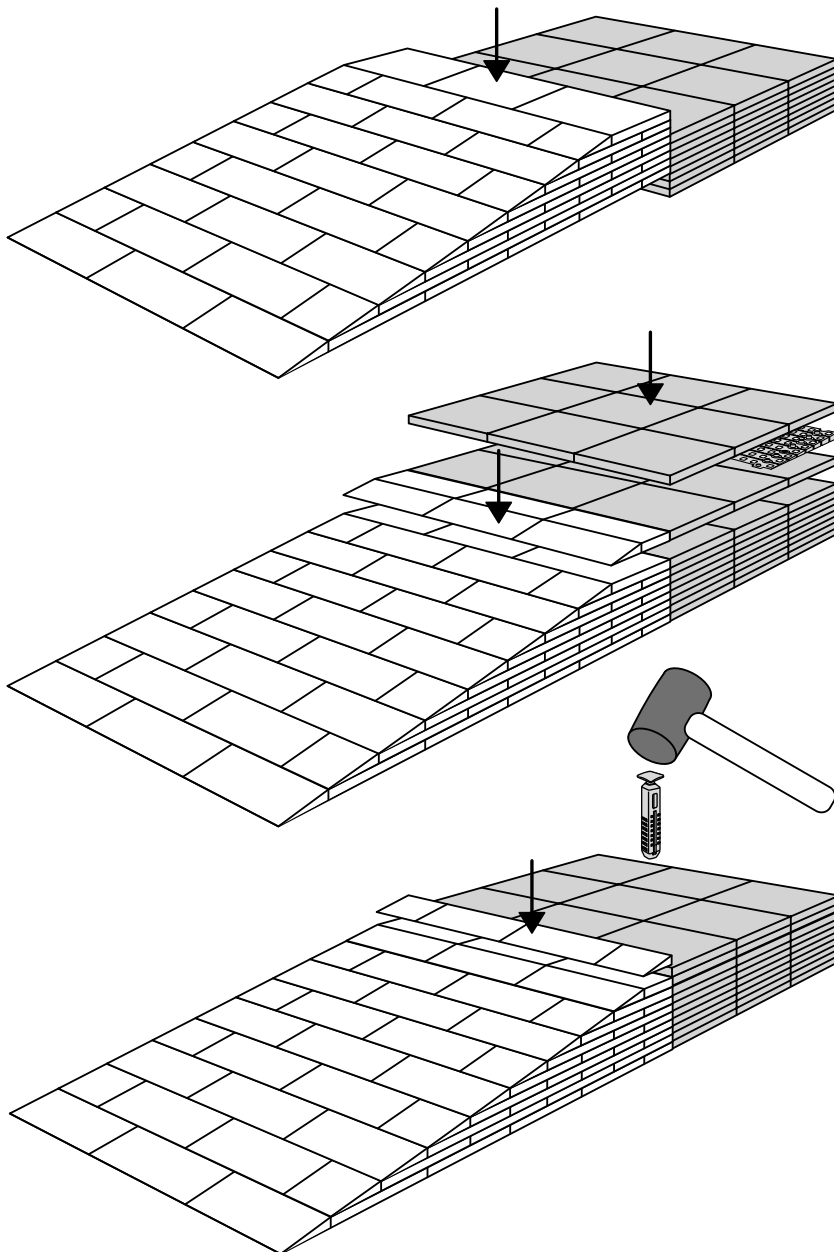


Locks in Ramp KIT:
See KIT instruction for placement
of Locks in the Ramp KIT.

Locks in platform:
S-Lock is mounted
on the top layer.


Use rubber hammer
(Not included)

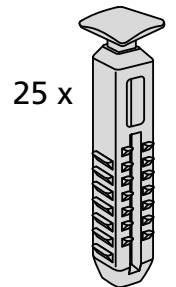


S-Lock

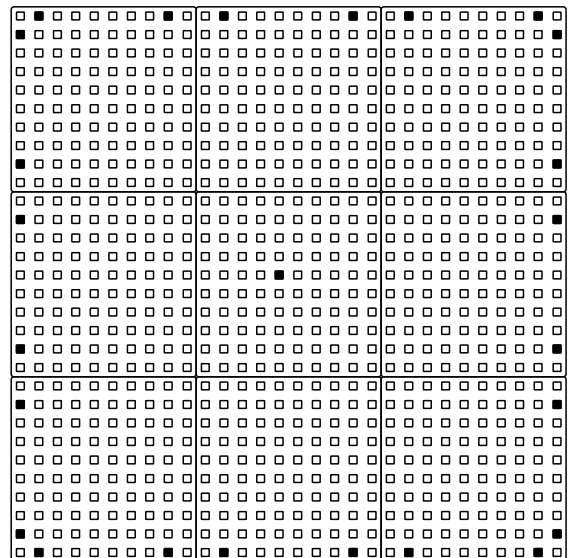

FASTENING WITH MOUNTING PADS

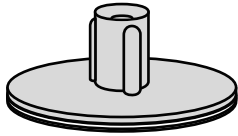

Indoor:

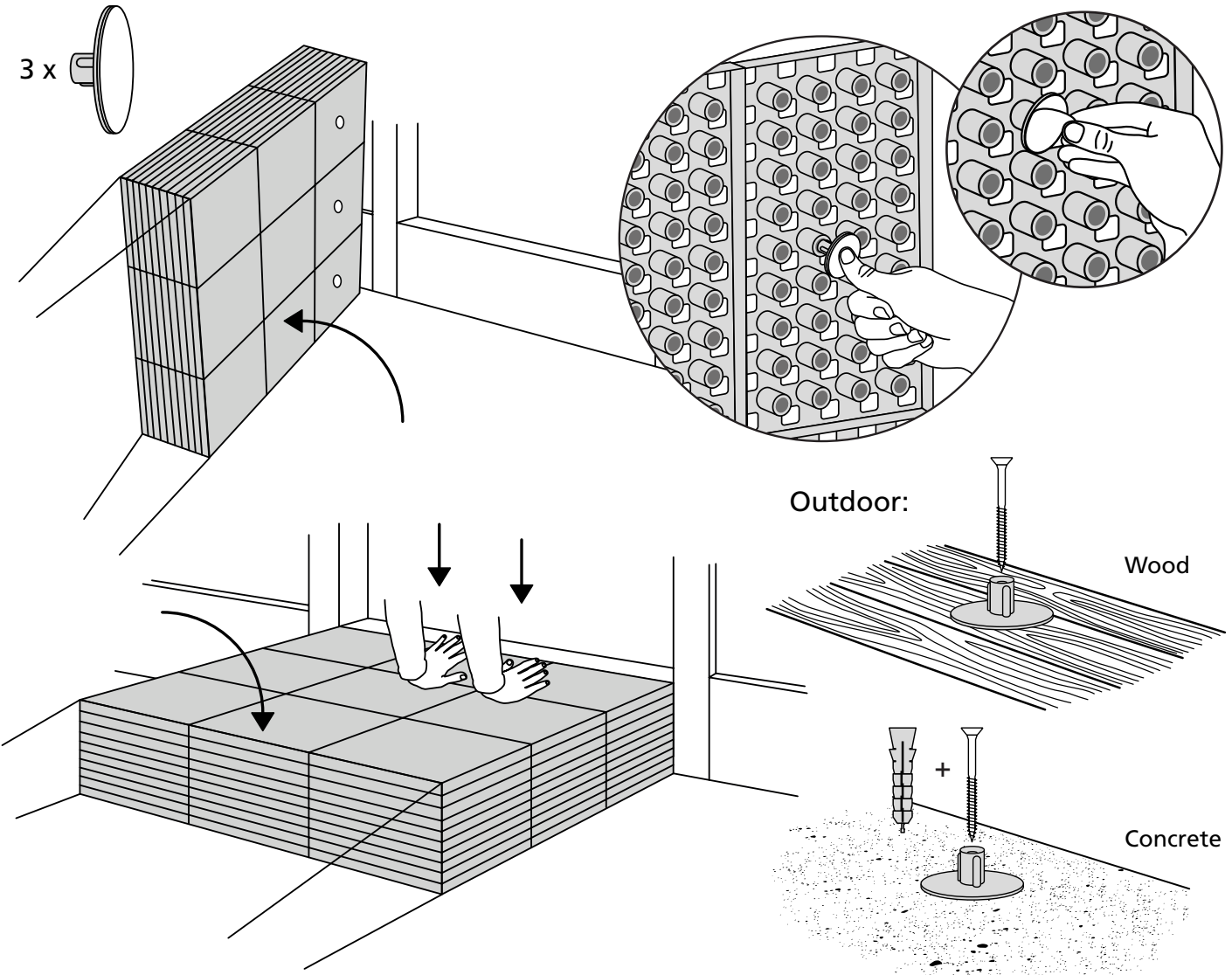

MOUNTING WITH STOPPERS

