

FAUTEUIL RELEVEUR PERLE MINI– 821023

MANUEL D'INSTRUCTIONS



INTRODUCTION

Le fauteuil releveur Perle Mini est conçu pour aider les personnes à se lever aisément du fauteuil à l'aide de moteurs commandés électroniquement.

Veuillez lire attentivement le manuel pour assurer une bonne utilisation du fauteuil, et particulièrement les notes relatives à la sécurité.

SPECIFICATIONS

Largeur Assise	50 cm	Alimentation	100-240V // 50Hz – 40W
Profondeur Assise	46 cm	Matériaux	- Revêtement selon modèle
Hauteur Assise	46 cm		- Structure en bois et acier
Hauteur Dossier	66 cm		- Remplissage en mousse PU et
Poids du fauteuil	49 kg		Fibre polyester.
Charge maximale	155kg		

SÉCURITÉ

1. Assembler le fauteuil correctement conformément aux instructions d'assemblage ci-jointes. Les fabricants du fauteuil, leurs mandataires et distributeurs ne sont pas responsables des dommages causés par un assemblage inadéquat.
2. Placer le fauteuil sur un sol dur, horizontal et stable.
3. Ne pas utiliser le fauteuil dans un environnement humide ou poussiéreux pour éviter les risques de décharge électrique et les problèmes mécaniques. Le fauteuil doit être placé dans une pièce sèche. Ne pas utiliser le fauteuil lorsque la température ambiante dépasse 40 degrés.
4. Ne pas utiliser le fauteuil à l'extérieur.
5. Lorsque le fauteuil est inutilisé pendant une longue période, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter toute surchauffe.
6. Ne pas déposer ni placer d'objet lourd sur les accoudoirs, le repose pieds ou le dossier du fauteuil.
7. Ne pas sauter ni jouer sur le fauteuil. Les enfants qui utilisent le fauteuil doivent être supervisés par un adulte. Le fauteuil n'est pas conçu pour les enfants.
8. S'assurer que la tension électrique correspond aux spécifications indiquées pour le fauteuil.
La connexion électrique doit être effectuée conformément aux règlements locaux. Ne pas débrancher la fiche de la prise murale brusquement et ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
9. Ne pas brancher ni débrancher la fiche de la prise murale avec les mains mouillées pour éviter un risque de décharge électrique ou de panne mécanique.
10. Ne pas utiliser le fauteuil si le cordon ou la fiche de l'adaptateur est endommagé ou si la prise électrique est excessivement lâche.
11. Faire preuve de prudence en actionnant la fonction d'élévation lorsque le dossier du fauteuil est incliné. Le dossier doit être en position verticale au moment de prendre place sur le fauteuil ou de s'en lever, sauf dans le cas d'un transfert latéral avec élévation verticale.
12. Engager le frein des roulettes si le fauteuil en est équipé et s'assurer que le fauteuil est stable avant le transfert.

En cas de dysfonctionnement, merci de contacter votre revendeur.

Remarque : Toutes les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.

Mise en garde : Une hausse soudaine de la température peut créer de la condensation sur les pièces électriques ou mécaniques. Il est recommandé de laisser le fauteuil à température ambiante pendant au moins une heure avant de l'utiliser pour assurer un fonctionnement adéquat et réduire les risques de panne mécanique.

Ne pas utiliser le fauteuil releveur dans les situations suivantes :

- a) Déversement accidentel d'eau sur l'appareil. Ceci pourrait causer une décharge électrique.
- b) Déchirement du revêtement, exposant la mécanique intérieure.
- c) Défaillance ou toute autre condition anormale pendant le fonctionnement.

Ne pas placer ses doigts sur les mécanismes en mouvement !


Faire preuve de prudence en cas de panne de courant. Il y a risque de blessure si l'alimentation est rétablie de manière imprévue et que les touches de fonctionnement sont activées.

Éviter d'utiliser le fauteuil pendant des orages violents.

Éteindre la commande de mise en marche immédiatement et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale en cas de dommage apparent ou de mauvais fonctionnement.

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


- 1) Retirer le siège et le dossier de leur emballage.
- 2) Tenir le siège et le rabat du revêtement des deux mains et aligner les supports.
- 3) Exercer une pression vers le bas et s'assurer que les deux côtés s'enclenchent en position verrouillée.

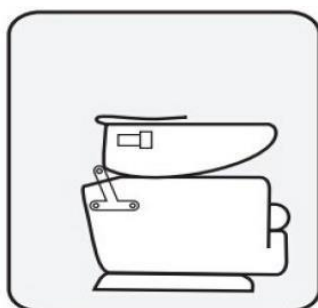

Étape 1



Étape 2

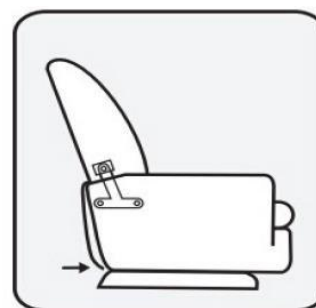

Étape 3


Note : Les deux supports arrière doivent être glissés sur les barres verticales simultanément pour éviter tout blocage.

Note : Ne pas assembler le fauteuil si le revêtement ou toute pièce du fauteuil sont endommagés.

CONNEXIONS ELECTRIQUES

Note : Les fils doivent être correctement connectés pour un fonctionnement adéquat.

- 1) Connecteur du moteur au fil
- 2) Connecteur du fil à l'adaptateur
- 3) Connecteur de l'adaptateur à la fiche
- 4) Connexion de la télécommande

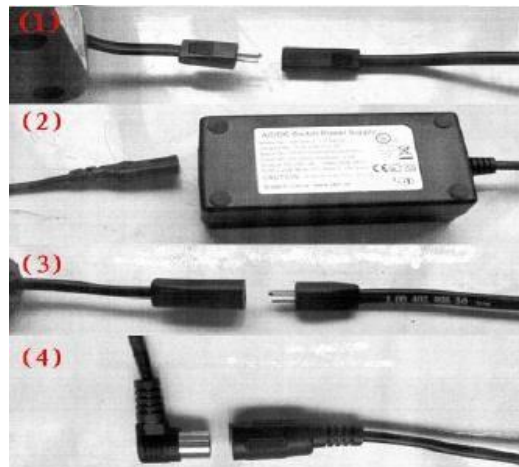

POSITIONNEMENT DU FAUTEUIL

Laisser un espace suffisant à l'avant et à l'arrière du fauteuil pour permettre de l'incliner.

Pour permettre une inclinaison dégagée, garder un espace minimal de 65 cm derrière le fauteuil.

Laisser au moins 40 cm devant le fauteuil.

Placer le fauteuil sur une surface ou un plancher de niveau dans une pièce sèche.

Mise en garde

Éliminer toute obstruction derrière ou devant le fauteuil pour permettre une inclinaison et une élévation sécuritaires durant le fonctionnement.

La section entre le siège et le repose-pied doit être libre de tout encombrement pour éviter les risques de pincement lorsque le fauteuil est utilisé.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

1. Entreposage

Essuyer la poussière et la saleté. Garder le fauteuil propre et loin des endroits à humidité élevée.

Si le fauteuil est inutilisé pendant une longue période, le couvrir d'un morceau de tissu pour le protéger de la poussière. Entreposer dans un endroit sec.

Ne pas entreposer le fauteuil sous les rayons du soleil ou dans des endroits où la température est élevée. L'exposition pourrait entraîner la décoloration du tissu.

2. Entretien

Avant de nettoyer, que la fiche d'alimentation est débranchée de la prise.

Ne pas utiliser de lingettes humides pour nettoyer les fauteuils avec revêtement en similicuir (polyuréthane) à moins qu'il s'agisse de notre similicuir résistant à l'incontinence. Les agents de nettoyage du cuir peuvent être utilisés si le revêtement est en cuir.

3. Corps du fauteuil

Utiliser du savon très doux pour nettoyer le plastique, la structure et le revêtement du fauteuil. Nettoyer délicatement toute trace de savon à l'aide d'un linge sec.

Pour nettoyer une tache sèche, tremper un morceau de tissu doux dans une eau savonneuse tiède, bien essorer et nettoyer la tâche.

Ne pas utiliser d'agents de nettoyage ou de détachage solvantés, ni aucun autre nettoyant pouvant causer la décoloration du tissu ou rayer le revêtement.

Ne pas retirer le revêtement pour le nettoyer. Il est strictement interdit de repasser le revêtement au fer.

SYSTEME DE BATTERIE DE SECOURS

Les fauteuils peuvent être munis en option (consultez votre revendeur) de 2 batteries 9 volts de secours, destinées aux manœuvres en cas de panne d'alimentation.

Dans le cas d'une panne d'électricité, le fauteuil passera automatiquement aux batteries de secours, mais uniquement le temps d'un cycle avant que les batteries soient déchargées. Il est recommandé de remplacer les batteries après chaque utilisation d'urgence.

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Utiliser uniquement un linge sec pour nettoyer la télécommande. L'humidité excessive peut endommager la télécommande.

1. Appuyer sur le bouton du bas pour lever le repose pied et incliner le dossier.
2. Pour revenir à la position initiale, appuyer sur le bouton du haut.
3. Pour se relever facilement, garder le bouton du haut appuyé.

