



Mèches hémostatiques stériles COALGAN®



■ Gamme **Urgence & Accessoires**

RÉFÉRENCE : **MEC 7513 COA**

Gencod : 3401073757667



DESCRIPTION

- Boite de 5 mèches hémostatiques stériles

COMPOSITION & PRESENTATION

Fibres d'alginate de calcium (origine végétale)
Mèche de 4 cm emballée en sachet individuel, stérilisée par rayonnement β
Information complète sur la notice incluse

UTILISATION

Les mèches sont hémostatiques, cicatrisantes, et sont à usage unique

Coalgan® doit toujours être utiliser dans son intégralité, il ne doit pas rester en place + de 24 h, et ne doit pas être réutiliser

Elles sont conseillées pour le traitement des petites coupures, saignements de nez, petites plaies diverses, mais également des saignements et extractions dentaires.

Elles doivent être utilisées qu'avec du sérum physiologique pour le pré nettoyage de la plaie (pas de chlorhexidine)

Les retraits sont sans douleur

INDICATION

Coalgan mèche est indiqué en cas de :



INTERACTIONS

Coalgan ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivres.

Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0.9% avant d'appliquer Coalgan®.

Dispositif Médical de classe II b, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.