

## ROLLATOR FAUTEUIL DE TRANSFERT VICTOR

### Réf 826228

Nous vous remercions d'avoir ce Rollator Transfert VICTOR.  
Pour un meilleur usage, veuillez prendre connaissance de cette notice.



#### Précautions.

1. Avant de l'utiliser, veuillez vous assurer que le Rollator est correctement déplié, l'assise abaissée, et que les barre-charnière sous latérales soient en position ouverte et verrouillée.
2. Vérifiez que le Rollator est en parfait état et adapté à l'usage que vous voulez en faire.
3. S'assurer que les poignées soient bien réglées à hauteur identique, et que les vis de verrouillage parfaitement serrés.
4. Testez le bon fonctionnement des roues et des freins avant chaque usage. Les roues arrière ne doivent pas rouler lorsque les freins sont bloqués.
5. Toujours s'installer sur l'assise lorsque le Rollator est immobile et freins bloqués.
6. Remplacez toute pièce défectueuse. Ne pas utiliser le Rollator avec des pièces défectueuses ou cassées.
7. Ne pas utiliser sous emprise d'alcool, drogue ou autre substance pouvant altérer le comportement.
8. Ce Rollator peut être utilisé comme fauteuil de transfert. Toutefois il n'a pas été conçu pour un usage intensif de transport de personnes. Ne pas l'utiliser comme tel, notamment ne pas le faire rouler lorsqu'une personne est assise dessus.

ATTENTION : Un usage inapproprié et /ou un mauvais entretien de votre Rollator Victor peut provoquer de très grave complication pour son utilisateur. Toujours être parfaitement conscient de ses capacités physiques quand vous l'utiliser en marchant ou en position assise. Ne pas faire rouler à une allure excessive et être attentif à d'éventuels obstacles tels que marches, trous, pierres, rainures, trottoirs ...

Ne pas utiliser le Rollator Victor si vous n'êtes pas en mesure de marcher seul et passer de la position assise à debout sans assistance. Demandez l'avis de votre médecin. Restez très prudent lorsque vous vous relevez de l'assise, et veuillez ne JAMAIS vous assoir ou vous relever sans que les freins ne soient parfaitement VERROUILLES. Contrôlez régulièrement les points de fixation et de serrage. NE JAMAIS utiliser le Rollator Victor si une pièce est manquante ou cassée.

#### Instructions d'assemblage.

1. Retirez le Rollator et tous ses composants de l'emballage
2. Ouvrez le Rollator et poussez l'assise vers le bas, assurez-vous que les la barre-charnières latérales soient en position ouvertes et verrouillées
3. Installer la barre d'appui de dossier en introduisant chaque extrémité dans les logements prévus. Le « click » informe du bon montage.
4. Réglez la hauteur des poignées. Les hauteurs doivent être les mêmes à droite et à gauche. Boquez les tubes en serrant les vis de chaque côté. Assurez-vous que les câbles restent bien à l'extérieur de la structure, et que les gaines ne soient pas écrasées ou pliées.
5. La bonne hauteur des poignées est celle où vous vous tenez droit, mains sur les poignées sans cambrer les poignets.

#### Utilisation du Rollator Victor

1. Pour ralentir, serrez légèrement les leviers des poignées avec vos doigts. Le serrage doit se faire simultanément à droite et à gauche.
2. Pour verrouiller les freins, par exemple pour immobiliser le Rollator, pousser fermement les 2 leviers de poignée vers le bas jusqu'à ce qu'ils se verrouillent d'eux-mêmes.
3. Pour déverrouiller les freins, tirez vers le haut les 2 leviers des poignées.
4. Pour utiliser en transport de personnes, installez la barre d'appui du dossier dans l'autre sens et abaissez la palette repose-pieds

Dimensions hors-tout : larg. 61 x prof. 60 x haut. 78/89 cm. Poids 8.8 kg.

Dimensions assise : larg. 45 x prof 32 x haut. 52 cm.

Résistance 115 kg

IDENTITES

Rue de la Forgerie - ZA Pôle 49 - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)