

## CAPILUVE

REFERENCE 823059



### Description

Notre capiluve permet de faire un shampoing très facilement aux personnes alitées. Il suffit de le glisser sous les épaules du patient pour qu'il tienne fermement, et de positionner la nuque dans le bassin. Le large bassin permet d'être libre dans ses mouvements. L'eau ne stagne pas, elle part dans le réservoir interne du capiluve qui peut contenir jusqu'à 8 litres. Lorsque le shampoing est fini, l'ensemble est transportable facilement, sans fuite d'eau, pour le vider grâce au bouchon de vidange. Un shampoing facile et sans effort inutile.

### Avantages

- Transportable
- Réservoir d'eau pouvant contenir jusqu'à 8 litres
- Facile à utiliser

### Dimensions

60 x 60 x 16 cm

**Poids :** 2.7 kg

**Poids réservoir plein :** 10.7 kg

**Couleur :** bleu et blanc

**Matières :** polyéthylène plastique

### Distributeur :

Identités (49)

## **NOTICE**

*Note : Le drain du bassin est situé à l'intérieur du capiluve. Système de lavage de la tête.*

### **Utilisation :**

1. Avant l'utilisation, ouvrir le drain du capiluve et desserrer le bec verseur pour l'écoulement.
2. Positionner la tête de la personne à l'endroit prévu à cet effet (cou sur le rebord du capiluve).
3. Humidifiez les cheveux et shampooinez les cheveux.
4. Rincer et essuyez les cheveux.
5. Avant de fermer le drain du capiluve, s'assurer que toute l'eau a été vidangée dans l'intégralité.
6. Fermer le tuyau de vidange
7. Pour vider, placer l'appareil en position verticale, puis desserrer le drain du capiluve et ouvrir le drain du bec.
8. Videz l'eau du drain dans un évier.

### **Remarque :**

- Pour éviter les fuites, s'assurer que les deux joints en néoprène soient toujours en place lors de la fermeture du drain du capiluve.
- Le capiluve doit être nettoyé avec un savon doux ou un détergent doux.
- Un désinfectant par pulvérisation peut être utilisé pour nettoyer l'appareil et éviter les moisissures.
- Assurez-vous de bien rincer après avoir utilisé des désinfectants ou des détergents.



Rue de la Forgerie – ZA pôle 49  
49480 Saint Sylvain d'Anjou