

# MICROTOISE MURALE

Références 861032

**Description générale** Toise à ruban en plastique murale avec curseur, longueur 200 cm, dite MICRO TOISE. Graduation par centimètres et millimètres.

**Code ACL** Non

**Dispositif raccordé** Non

**Dispositif Usage Unique** Non

**Dispositif stérile** Non

**Stérilisation** Non

**Autoclavable** Non

**Nettoyage** Oui Avec une eau savonneuse ou du détergent.

**Substance impropre** Produit attaquant le plastique ABS.

**Pièces constitutives** Oui Boîtier ABS, ruban en métal coulissant, 3 vis de fixation, pièce de mousse adhésive.

**Matières** En plastique ABS et ruban en fer peint en blanc. *Artistatique*

**Contient du latex** Non

**Standard de fabrication** S.O.

**Étiquetage** Oui Sur la boîte : Nom, longueur, référence, COMED, adresse

**Emballage** Boîte en carton individuelle.

**Stockage particulier** Oui Sec et propre

**Marquage sur le DM** Oui Sur le boîtier et la zone de fixation : COMED

**Désignation** Toise à ruban dite MICRO TOISE

**Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm** 150 x 34 x 120

**Poids net (g)+- 1%** 127,1

**Couleurs** Boîtier blanc, ruban blanc, marquage en rouge pour les décimètres et noir pour les centimètres.

**Utilisation** Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps humain.

**Mode d'emploi** Cet article est déclaré comme Dispositif Non Médical, Directive 93/42 modifiée 2007/47, nous n'avons pas retenu la fonction de mesurage au sens de ladite Directive car cette fonction ne correspond pas à une finalité médicale ou une revendication médicale. Le fait de connaître la taille d'une personne, avec cette tolérance sur la graduation en autres, n'apporte pas une mesure susceptible d'être utilisée à des fins thérapeutiques ou de diagnostic. Elle ne concerne qu'une indication non comparative avec un étalon légal de la morphologie de la personne, comme le poids par exemple. Cet instrument ne doit donc pas être utilisé à des fins médicales de mesures métrologiques pouvant entraîner un diagnostic.

Fixer la toise au mur dont la base doit se situer à 200 cm. Utiliser les 3 vis pour la fixation. Lecture directe à travers la fenêtre. Voir mode d'emploi dans la boîte.

**Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique** Bien vérifier la fixation au mur de la toise, risque de chute.

**Recyclage** Oui

**Récupération** Containers pour plastique ABS

**DEEE/REACH** Non/NC

**Phtalates/PVC** Non/Non

